



KOD KATALOGOWY	AM-OSN-L-03
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	ORTEZA NADGARSTKA AM-OSN-L-03
CODE	AM-OSN-L-03
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	WRIST ORTHOSIS AM-OSN-L-03




- 1. PL:** Umieść rękę na ortezie w miejscu przebiegu szyny dłoniowej.  
**EN:** Place the wrist on the brace.

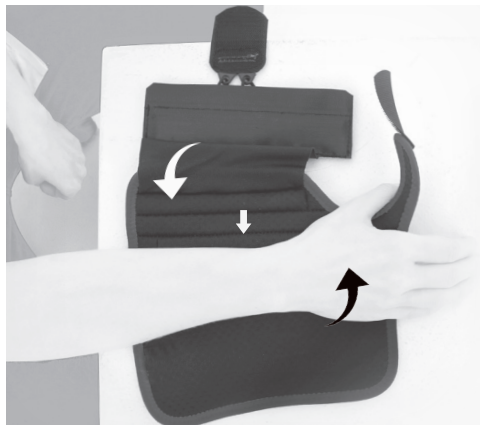

- 2. PL:** Załóż ortezę na rękę.  
**EN:** Put the brace on the wrist.

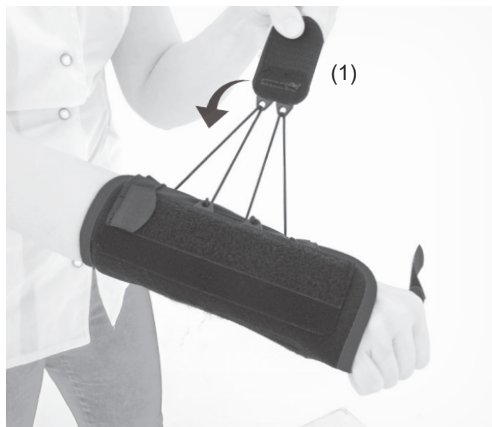

**3. PL:** Zapnij rzep (1).  
**EN:** Fasten with Velcro (1).

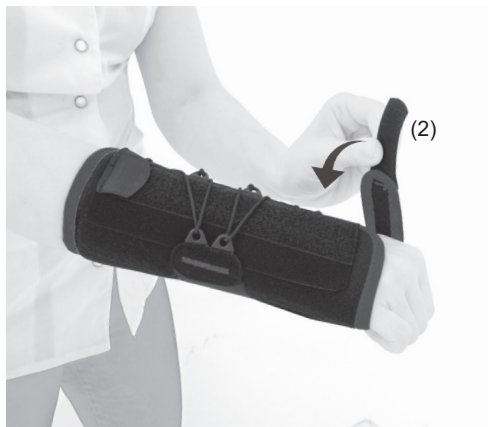

**4. PL:** Zapnij rzep kciuka (2).  
**EN:** Fasten the thumb Velcro (2).



**5. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.

