



KOD KATALOGOWY	AM-SX-03
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOSTKI
MODEL	ORTEZA KOSTKI AM-SX-03
CODE	AM-SX-03
TRADE NAME	ANKLE ORTHOSIS
MODEL	ANKLE ORTHOSIS AM-SX-03

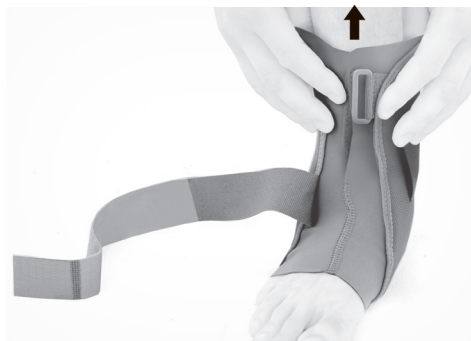

- 1. PL:** Załóż ortezę na nogę.
EN: Put the brace on the leg.



- 2. PL:** Zapnij rzep (1).
EN: Fasten the Velcro (1).

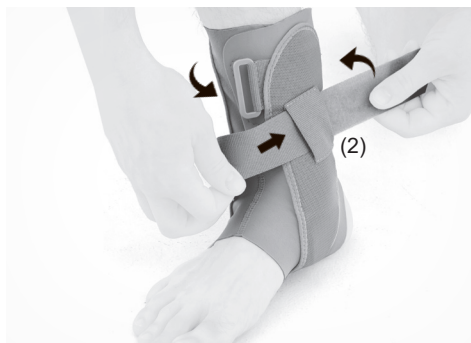

- 3. PL:** Przepleć taśmę przez szlufkę (2), następnie przepleć przez klamrę (3) i zapnij rzep.
EN: Interlace the strap through the belt loop (2), then pierce through the buckle (3) and fasten the Velcro.



- 4. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.

