

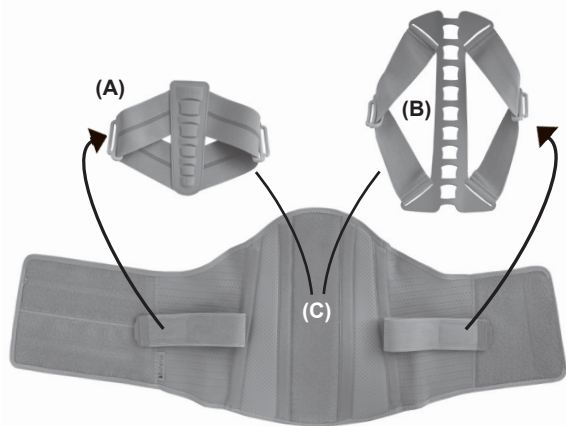




KOD KATALOGOWY	EB-LK-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA EB-LK-02
CODE	EB-LK-02
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT EB-LK-02

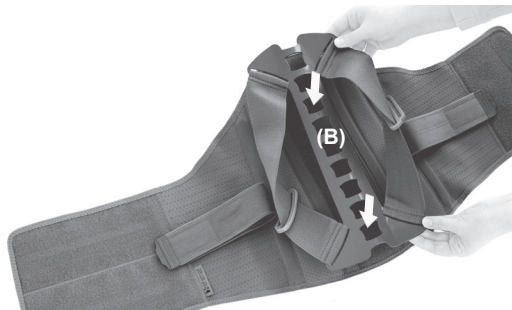

- A. Pelota lędźwiowa**
/ Lumbar part
- B. Aluminiowy stabilizator kręgosłupa**
/ Aluminum spine stabilizer
- C. Pas lędźwiowo-krzyżowy**
/ Lumbo-sacral belt

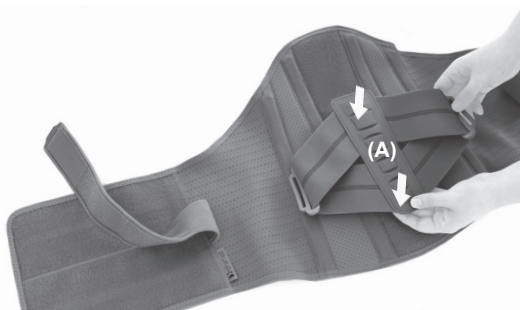

- 1. PL:** Przytnij element (A lub B) do wyrobu (C) na odpowiedniej wysokości.
EN: Fasten the element (A or B) to the product (C) at the at the required height.

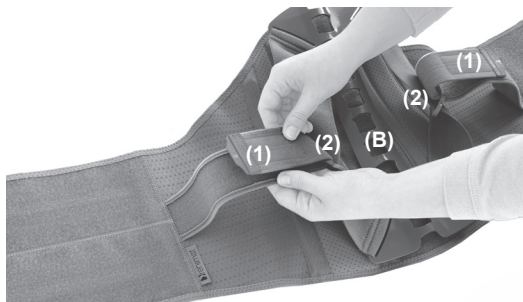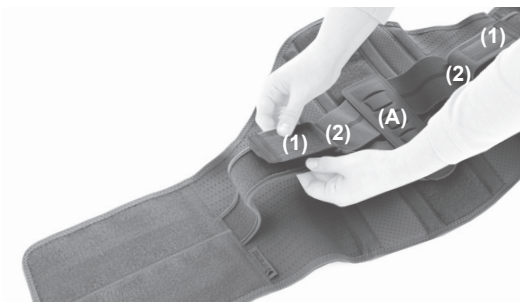

- 2. PL:** Przepleć pasy (1) przez klamry (2) elementu (A lub B) i zapnij rzepy w taki sposób, aby taśmy pozostawały luźne.
EN: Interlace the straps (1) through the buckles (2) of the element (A or B) and fasten the Velcro fasteners, so that the straps remain loose.



3. PL: Przyłóż ortezę (C) w okolice lędźwiowo-krzyżową kręgosłupa, ustaw odpowiednią kompresję i zapnij rzep (3).

EN: Place the brace (C) on your lower back, set the right compression and fasten the Velcro (3).




4. PL: Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij pasy dociągowe z przodu na rzepy (4).

EN: Set the right compression and fasten tension belts at the front (4).

NISKI POZIOM STABILIZACJI / LOW STABILIZATION



(A)

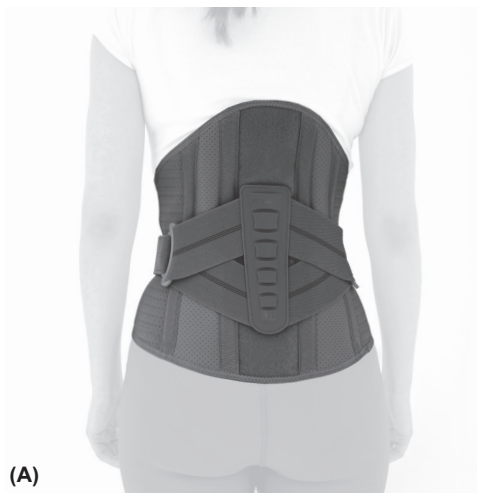

WYSOKI POZIOM STABILIZACJI / HIGH STABILIZATION



(B)



5. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.