


KOD KATALOGOWY	AM-WSP-07/TLSO
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA AM-WSP-07/TLSO
CODE	AM-WSP-07/TLSO
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT AM-WSP-07/TLSO




- A.** Dynamiczny stabilizator kręgosłupa z koszem biodrowym
Dynamic spine stabilizer with a hip basket

- 1. PL:** Rozepnij ortezę (1).
EN: Unfasten the brace (1).

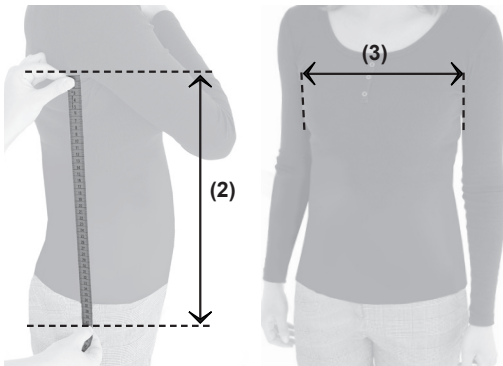


- 2. PL:** Zmierz wysokość odcinka od pachy do krętarza biodra (2) i szerokość pomiędzy pachami (3).
EN: Measure the height from the armpit to the trochanter of the hip (2) and the width between the armpits (3).

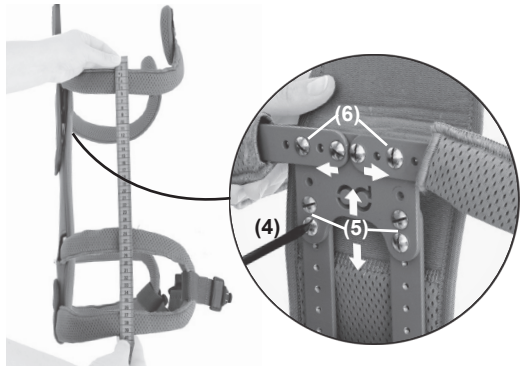


- 3. PL:** Dokonaj regulacji wysokości stelaża przy pomocy śrubokręta (4). Odkręć śruby (5), ustaw odpowiednią wysokość i zakręć śruby. Takiej samej regulacji dokonaj przy rozstawie elementów pachowych (6).
EN: Adjust the height of the frame using a screwdriver (4). Remove the screws (5), adjust the height and tighten the screws. Make the same adjustment with the spacing of the armpits (6).





- 4. PL:** Umieść stabilizator kręgosłupa (A) na ciele pacjenta.
EN: Place the spine frame (A) on the patient's body.

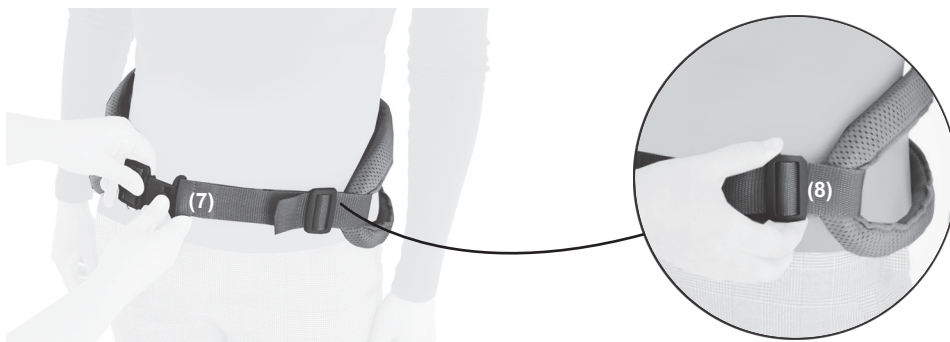

- 5. PL:** Dokonaj regulacji długości pasa (7) przy pomocy regulatora (8).
EN: Adjust the length of the belt (7) with the adjuster (8).

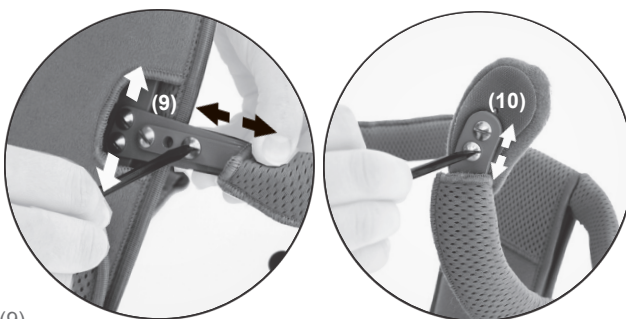

- 6. PL:** Jeśli istnieje potrzeba dokonaj regulacji kosza biodrowego (9) i pelot stabilizatora podpaszek (10) przy pomocy śrub.
EN: If necessary, adjust the hip basket (9) and pads of the underarm stabilizer (10) with screws.

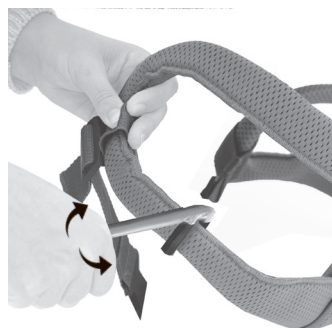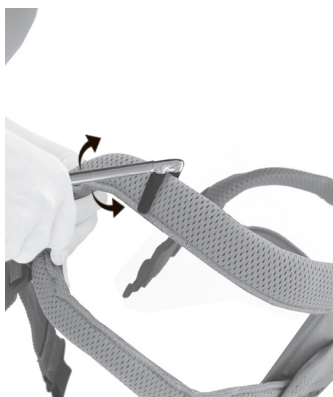

7. PL: Istnieje możliwość dogięcia stelaża przy pomocy specjalnego klucza (11). **UWAGA! REGULACJI DOKONUJEMY WÓWCZAS, GDY WYRÓB NIE ZNAJDUJE SIĘ NA CIELE PACJENTA.**

EN: It is possible to bend the frame with a special key (11). **ATTENTION! WE ADJUST THE PRODUCT WHEN IT IS ON THE PATIENT'S BODY.**



8. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.