

KOD KATALOGOWY	AS-N-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	ORTEZA NADGARSTKA AS-N-02
CODE	AS-N-02
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	WRIST ORTHOSIS AS-N-02




1. PL: Rozepnij wyrób i wsuń dłoń w ortezę, a kciuk umieść w otworze (1).

EN: Unfasten the brace and slide your hand inside, positioning your thumb in the designated hole (1).



2. PL: Opleć taśmę wokół nadgarstka we wskazanym kierunku, ustaw odpowiednią kompresję i zapnij rzep (2).

EN: Wrap the strap around your wrist following the indicated direction, adjust the compression, and secure it with Velcro (2).

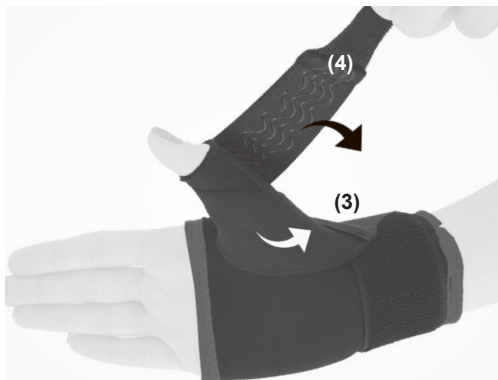

3. PL: Opleć kciuk we wskazanym kierunku, ustaw odpowiednie napięcie taśmy elastycznej i zapnij rzepy (3,4).

EN: Wrap the strap around your thumb as indicated, adjust the elastic band tension, and fasten it with Velcro (3,4).



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: The product is ready to use.

