



KOD KATALOGOWY	OKD-03
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ OKD-03
CODE	OKD-03
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT OKD-03



- A:** Podstawa ortozy / Orthosis base  
**B,C:** Elementy boczne / Side elements  
**D:** Poduszka pod kolanowa / Under knee pillow

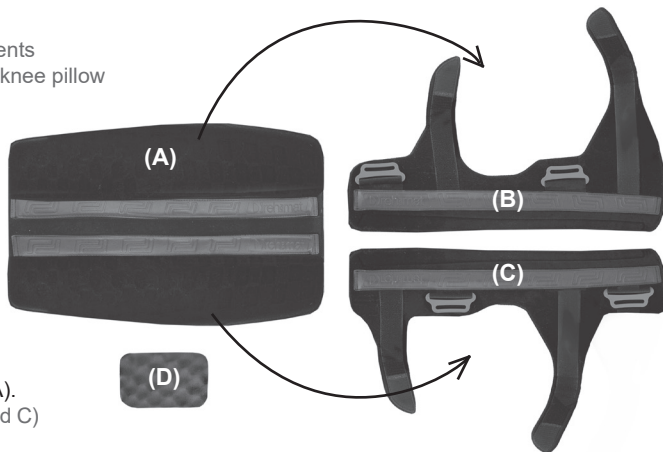

- 1. PL:** Odepnij elementy boczne (B i C) od postawy ortozy (A).  
**EN:** Detach the side pieces (B and C) from the orthosis base (A).

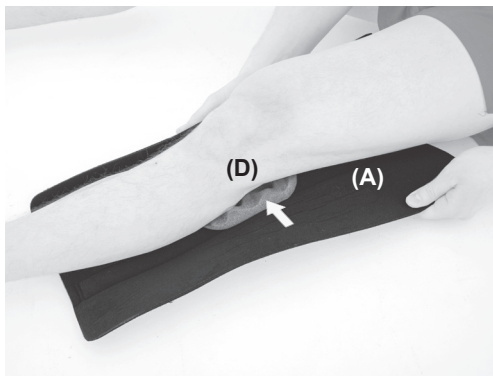

- 2. PL:** Zawsze zakładaj stabilizator na siedząco. Dopasuj element (A) z wyprofilowanymi stawkami do nogi. Jeśli jest potrzeba przyczep poduszkę (D) na rzep.  
**EN:** Always put the stabilizer on when seated. Fit the element (A) with orthopaedic stays to the leg. If necessary, attach under knee pillow (D)

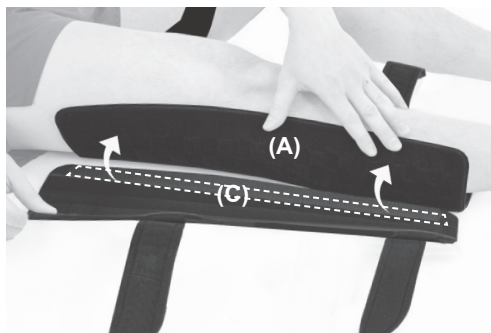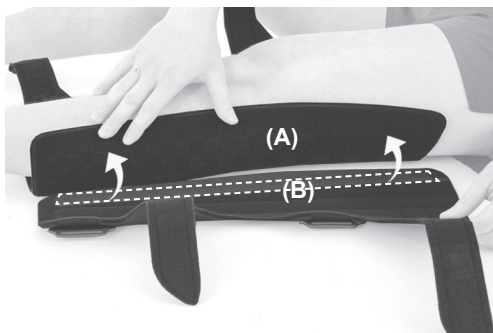

- 3. PL:** Przypnij elementy boczne (B i C) do postawy ortozy (A) od zewnętrznej i wewnętrznej strony nogi.  
**EN:** Attach the side pieces (B and C) to the orthosis base (A) from the outside and inside of the leg.



**4. PL:** Boczne usztywnienia powinny być ustawione po bokach stawu kolanowego.

**EN:** The side elements should be positioned on the sides of the knee joint.



**5. PL:** Przepleć taśmy przez klamry i zapnij w podanej kolejności (1,2,3,4). Zapinanie ortozy zawsze zaczynaj od pasków leżących najbliżej stawu kolanowego.

**EN:** Interlace the straps through the buckles and fasten them according to the following steps (1,2,3,4). First, buckle the straps which are the closest to the knee.



**6. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.