




KOD KATALOGOWY	AM-OSK-OL/1R-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ AM-OSK-OL/1R-01
CODE	AM-OSK-OL/1R-01
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT AM-OSK-OL/1R-01

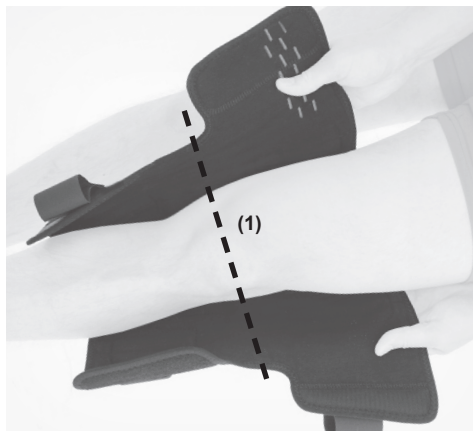


- 1. PL:** Rozepnij ortezę i przyłóż ją do nogi (1) w taki sposób, aby zegary sznury znajdowały się w osi stawu kolanowego.
EN: Unfasten the brace and place it on the leg (1) in such a way that the drop locks are in the axis of the knee joint.

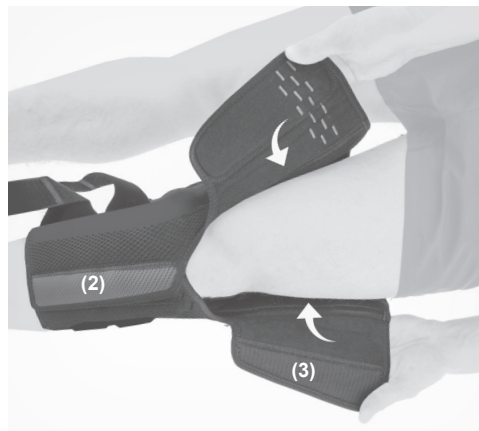

- 2. PL:** Zapnij rzepy według numeracji (2,3).
EN: Fasten the Velcro straps according to the following steps (2,3).

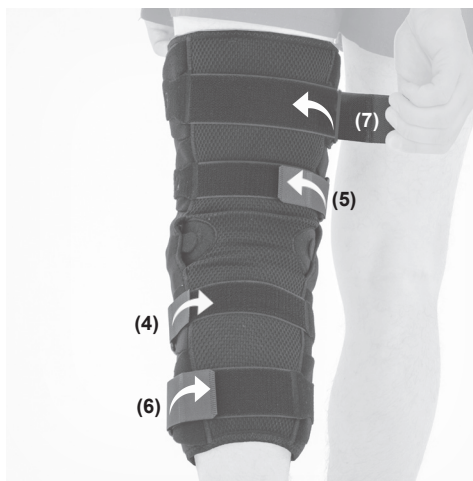

- 3. PL:** Przepleć taśmy przez klamry i zapnij w podanej kolejności (4,5,6,7,8,9,10,11).
EN: Interlace the straps through the buckles and fasten them according to the following steps (4,5,6 7,8,9,10,11).

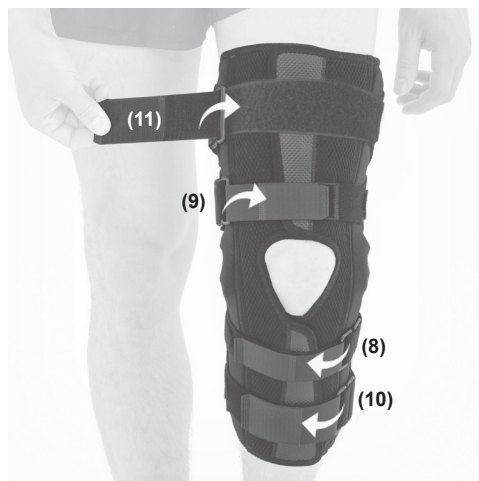

PL: UWAGA! Istnieje możliwość używania ortozy tylko z pasami przednimi.
EN: **ATTENTION!** It is possible to use the brace only with front straps.



- 4. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.