

KOD KATALOGOWY	AM-SN-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	ORTEZA NADGARSTKA AM-SN-02
CODE	AM-SN-02
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	WRIST ORTHOSIS AM-SN-02



- 1. PL:** Umieść rękę w ortezie tak, aby szyna przylegała do wewnętrznej strony dłoni (1).
EN: Place your hand in the brace, so that the splint is placed on the palmar part of your hand (1).



- 2. PL:** Przypnij rzep (2) w taki sposób, aby taśma znajdowała się w miejscu stawu nadgarstkowego. Opleć nadgarstek taśmą i zapnij rzep (3).
EN: Attach the Velcro (2) on the wrist joint. Wrap the tape around the wrist and close the Velcro fastener (3).



- 3. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.