



KOD KATALOGOWY	AM-KD-AM/1R
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	AM-KD-AM/1R
CODE	AM-KD-AM/1R
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-KD-AM/1R

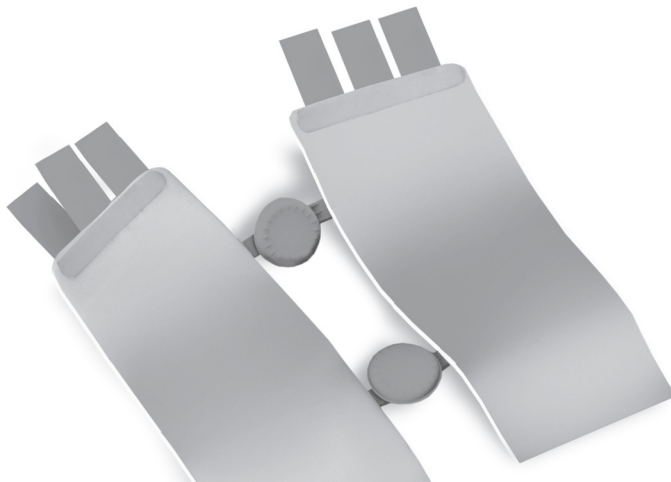


- 1. PL:** Rozepnij klamry aby przygotować ortezę do założenia.
EN: Unbuckle the brace.

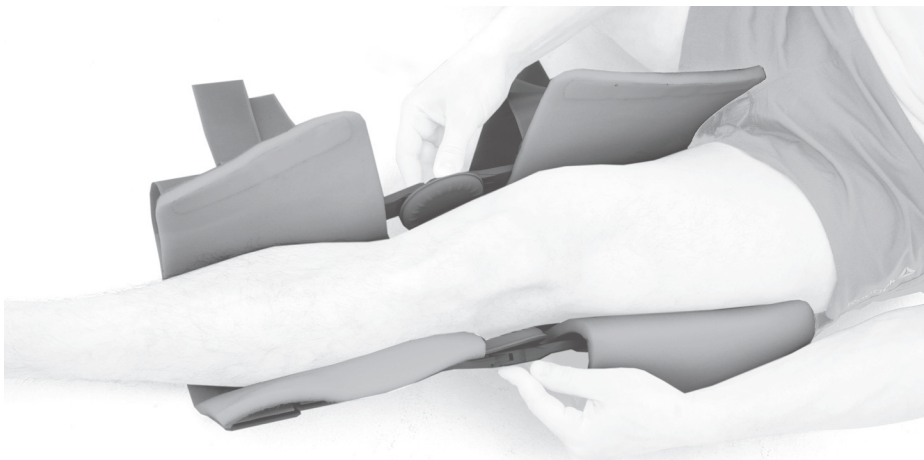



- 2. PL:** Stabilizator zawsze zakładaj na siedząco. Przed zapięciem ortozy zegary powinny być ustawione dokładnie po bokach stawu kolanowego (w lini szpary stawowej) w określonym przez lekarza prowadzącego zakresie ruchomości.
EN: The po-op to knee brace should be put while seating. Before buckling the straps, the drop locks should be on height of the femurs condyles (in joint space). The ROM should be adjusted according the specialist recommendation.




- 3. PL:** Zapnij rzepy według numeracji (1, 2). Jeśli zajdzie taka potrzeba, odetnij zbędną długość ortezy.
EN: Fasten the Velcro straps according to the following steps (1, 2). If necessary, cut the needless part of brace.

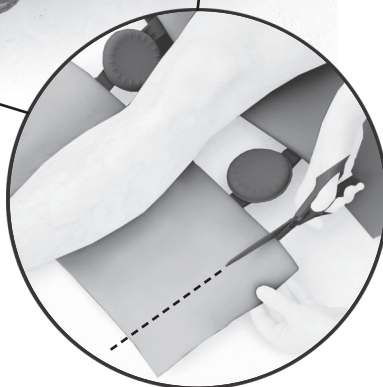

- 4. PL:** Dopasuj rzepy i odetnij zbędną długość pasków.
EN: Adjust the Velcro and cut the needless part of straps off.

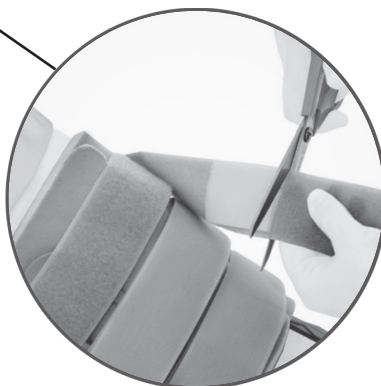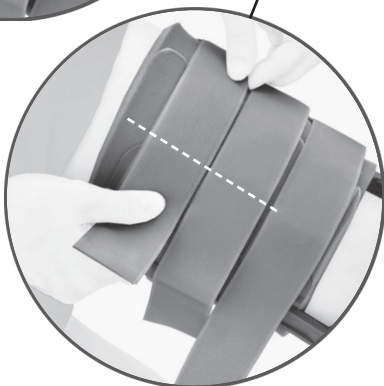

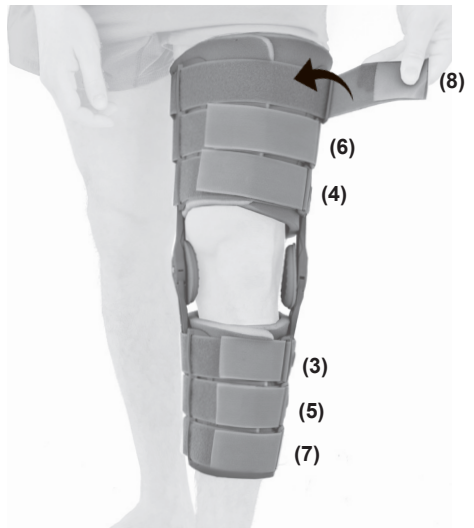

5. PL: Przepleć taśmy przez klamry i zapnij w podanej kolejności (3,4,5,6,7,8). Zapinanie ortozy zawsze zaczynaj od pasków leżących najbliżej stawu kolanowego. Regulowane paski powinny być takiej długości, aby po zapięciu orteza dobrze przylegała do nogi.

EN: Interlace the straps through the buckles and fasten them according to the following steps (3,4,5,6,7,8). First, buckle the straps which are the closest to the knee. The straps should have the appropriate length, so that the brace fits perfectly to the knee.



6. PL: PAMIĘTAJ! Tylko prawidłowo założona orteza pozostaje w osi stawu kolanowego i przylega równomiernie do całej kończyny.

EN: REMEMBER! Only correct adjustment of the knee brace provides perfect fitting!