

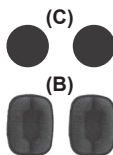


KOD KATALOGOWY	AM-OSK-O/1R-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ AM-OSK-O/1R-01
CODE	AM-OSK-O/1R-01
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT AM-OSK-O/1R-01

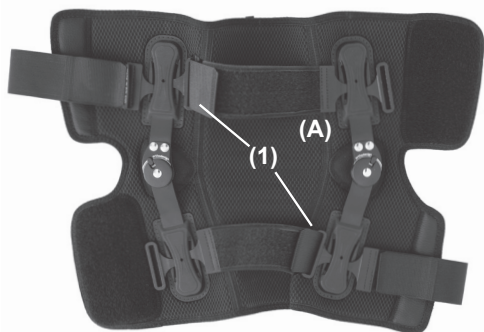

A: Orteza/The brace
B: Poduszki odciążające 3D/Offloading pad 3D
C: Rzepy/Velcro

- 1. PL:** Rozepnij ortezę i poluzuj tylne zapięcia (1).
EN: Unfasten the brace and loosen the rear fasteners (1).

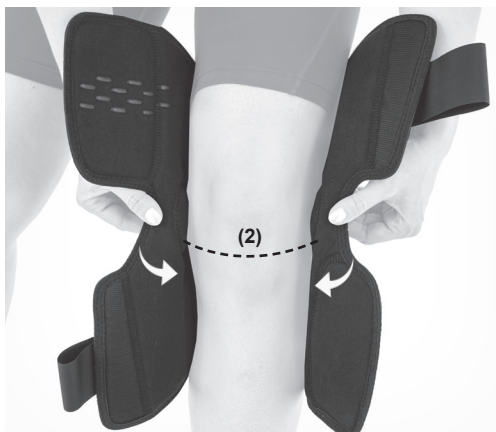


- 2. PL:** Przyłóż ortezę do nogi (2) w taki sposób, aby zegary szyn znajdowały się w osi stawu kolannego, w określonym przez lekarza prowadzącego zakresie ruchomości stawu. Tylko prawidłowo założona orteza pozostaje w osi stawu kolannego i przylega równomiernie do całej kończyny.

EN: Apply the brace to the leg (2) in such a way that the drop locks of the splints are in the axis of the knee joint, within the range of joint mobility specified by the attending physician. Only a properly worn orthosis remains in the axis of the knee joint and adheres evenly to the entire limb.



- 3. PL:** Zapnij ortezę na rzepy w podanej kolejności (3,4).
EN: Fasten the Velcro in the given order (3,4).

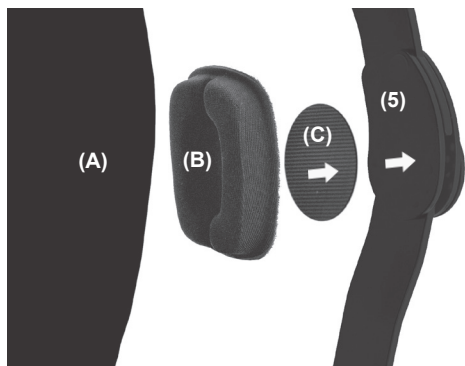

4. PL: Jeśli istnieje potrzeba wypełnienia przestrzeni pomiędzy szyną a szparą kolanową. Należy do zegara szyny (5) przykleić rzep (C) do którego przyczepia się poduszkę (B).

EN: If it is necessary to fill the space between the splint and the knee gap, attach the Velcro strip (C) to the splint hinge (5), onto which the cushion (B) is fixed.



5. PL: Przepleć taśmy przez klamry i zapnij w podanej kolejności (6,7,8,9).

EN: Interlace the straps through the buckles and fasten them according to the following steps (6,7,8,9).



6. PL: Gotowy wyrób.

EN: The product is ready to use.