


KOD KATALOGOWY	AS-KX-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOLANA
MODEL	ORTEZA KOLANA AS-KX-01
CODE	AS-KX-01
TRADE NAME	KNEE ORTHOSIS
MODEL	KNEE ORTHOSIS AS-KX-01

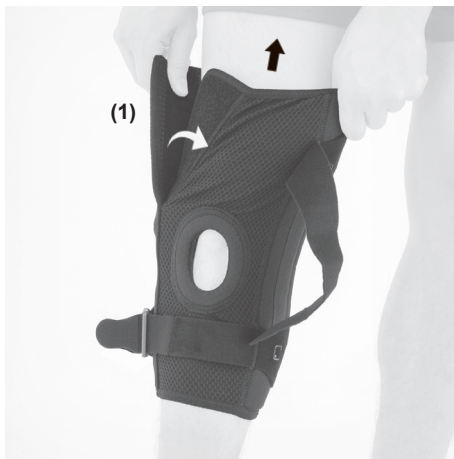

**1. PL:** Podciągnij ortezę do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okołorzepkowym i zapnij rzep (1).

**EN:** Pull the brace up to keep the kneecap in the patellar donut and fasten the Velcro closure (1).



**2. PL:** Przepleć paski przez klamerki i zapnij według podanej kolejności (2,3,4,5).

**EN:** Interlace the straps through the buckles and fasten the Velcro straps according to the following steps (2,3,4,5).

**PL:** UWAGA! Istnieje możliwość używania ortozy tylko z pasami przednimi.

**EN:** ATTENTION! It is possible to use the brace only with front straps.



**3. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.



**PL:** MOCNA STABILIZACJA  
**EN:** STRONG STABILIZATION



**SŁABA STABILIZACJA**  
**POOR STABILIZATION.**