


KOD KATALOGOWY	AS-KX-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOLANA
MODEL	ORTEZA KOLANA AS-KX-02
CODE	AS-KX-02
TRADE NAME	KNEE ORTHOSIS
MODEL	KNEE ORTHOSIS AS-KX-02

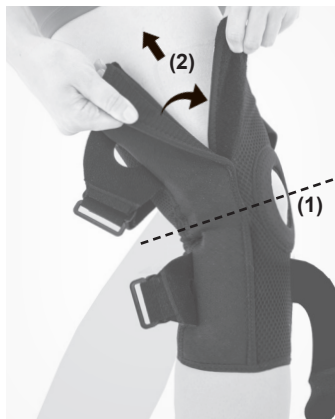

**1. PL:** Rozepnij paski, załóż ortezę na nogę i podciągnij do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okołorzepkowym (1), a zegar znajdował się w osi stawu kolanowego. Zapnij rzep (2).

**EN:** Unfasten the straps, put the brace on your leg and pull it up so that the patella is in the patellar hole (1) and the drop lock is in the axis of the knee joint. Close the Velcro (2).



**2. PL:** Przepleć paski przez klamkerki i zapnij według podanej kolejności (3,4,5,6).

**EN:** Interlace the straps through the buckles and fasten the Velcro straps according to the following steps (3,4,5,6).

**PL:** UWAGA! Istnieje możliwość używania ortozy tylko z pasami przednimi.

**EN:** **ATTENTION!** It is possible to use the brace only with front straps.



**3. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.



**PL:** MOCNA STABILIZACJA

**EN:** STRONG STABILIZATION



**PL:** PODSTAWOWA STABILIZACJA

**EN:** BASIC STABILIZATION.