



KOD KATALOGOWY	AM-OSK-O/2R
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	AM-OSK-O/2R
CODE	AM-OSK-O/2R
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-OSK-O/2R



- 1. PL:** Rozepnij ortezę.  
**EN:** Unfasten the brace.

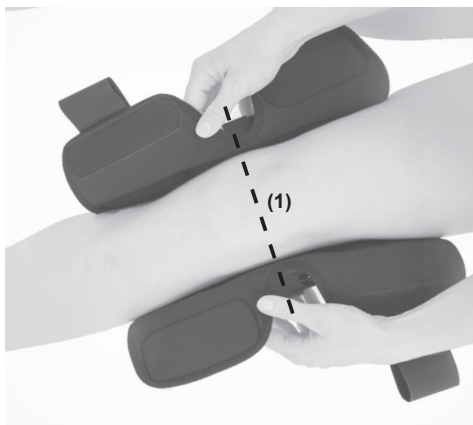

- 2. PL:** Przyłóż ortezę do nogi w taki sposób, aby zegary znajdowały się w osi stawu kolanowego (1).  
**EN:** Place the brace on the leg in such a way that the drop locks are in the axis of the knee joint (1).

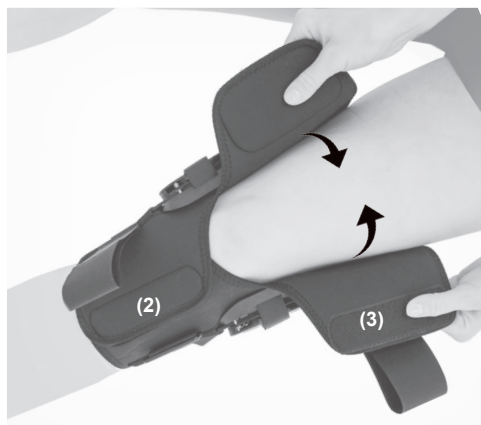

- 3. PL:** Zapnij ortezę na rzepy w podanej kolejności (2,3).  
**EN:** Fasten the brace at the back with Velcro according to the following steps (2,3).



**4. PL:** Przepleć taśmy przez klamry i zapnij je w podanej kolejności (4,5,6,7).

**EN:** Interlace the straps through the buckles and fasten them in the order shown (4,5,6,7).



**5. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.