



KOD KATALOGOWY	AS-KX-04
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOLANA
MODEL	ORTEZA KOLANA AS-KX-04
CODE	AS-KX-04
TRADE NAME	KNEE ORTHOSIS
MODEL	KNEE ORTHOSIS AS-KX-04

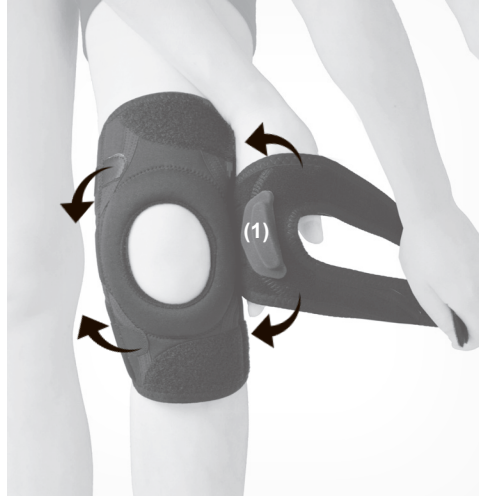

1. PL: Wciągnij ortezę na kończynę w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okotorzepakowym.
EN: Pull the brace up to keep the kneecap in the patellar hole.

2. PL: Skoryguj ustawienie rzepki za pomocą silikonowego elementu (1).
EN: Correct the patellar setting with the silicone regulator (1).

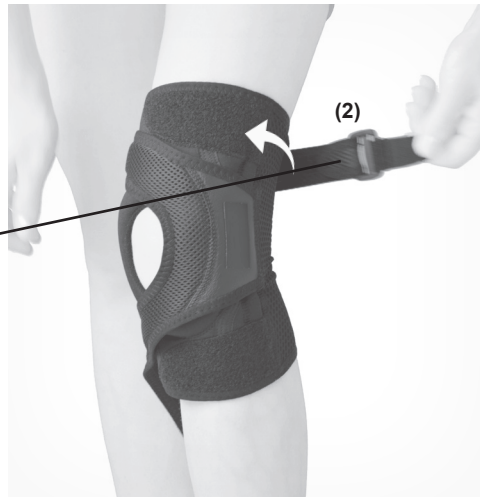

PL: Za pomocą regulatora dopasuj długość pasów.
EN: Use the buckle to adjust the length of the tapes.

3. PL: Zapnij pas obwodowy (2) na rzep.
EN: Fasten the wrap around (2) Velcro strap.



4. **PL:** Zapnij pas obwodowy (2) na rzep.
EN: Fasten the wrap around (2) Velcro strap.



5. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.