


KOD KATALOGOWY	AM-OSS-10
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOSTKI
MODEL	ORTEZA KOSTKI AM-OSS-10
CODE	AM-OSS-10
TRADE NAME	ANKLE ORTHOSIS
MODEL	ANKLE ORTHOSIS AM-OSS-10



- 1. PL:** Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace.



- 2. PL:** Za pomoc uchwytu (1) załóż ortezę na nogę, ustaw odpowiednią kompresję i zapnij rzep (2).
EN: Using the handle (1), put the brace on the leg, set the appropriate compression and fasten the Velcro (2).

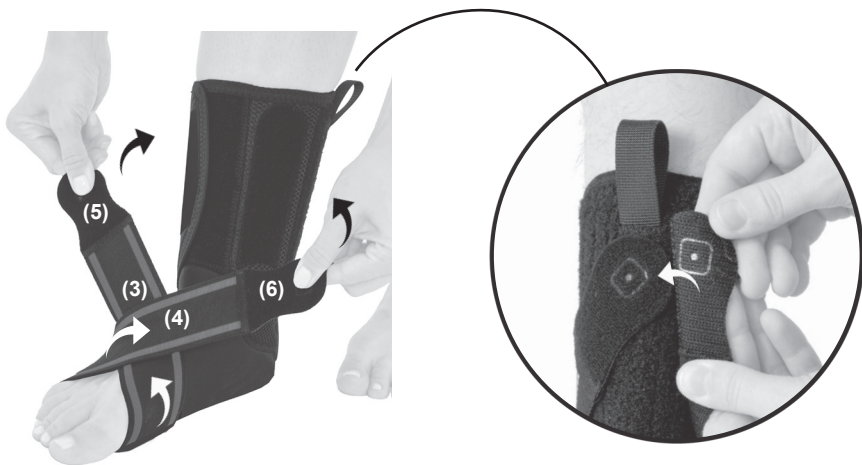

3. PL: Ustaw odpowiednie napięcie i zapnij pasy ósemkowe (3,4) na rzepy (5,6) według wskazanego kierunku.

EN: Set the appropriate tension and fasten the figure-eight straps (3,4) with the Velcro fasteners (5,6) in the indicated direction.



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.