


KOD KATALOGOWY	AM-KDX-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ AM-KDX-02
CODE	AM-KDX-02
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT AM-KDX-02



- 1. PL:** Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace.



- 2. PL:** Przyłóż ortezę do nogi. Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij rzep (1) pod rzepką.
EN: Put the brace on your leg. Set the appropriate compression and fasten the Velcro (1) under the kneecap.

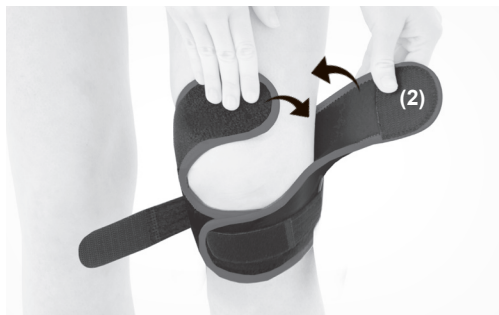

- 3. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij rzep (2) nad rzepką.
EN: Set the appropriate compression and fasten the Velcro (2) above the kneecap.



- 4. PL:** Ustaw odpowiednie napięcie i zapnij taśmy obwodowe (3,4).
EN: Set the appropriate tension and fasten the circumferential straps (3,4).



- 5. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.

