


KOD KATALOGOWY	AM-OSN-U-07
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	ORTEZA NADGARSTKA AM-OSN-U-07
CODE	AM-OSN-U-07
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	WRIST ORTHOSIS AM-OSN-U-07




1. **PL:** Wypłec paski z klamerek i rozlož ortezę.
EN: Remove the straps from the buckles and unfold the brace.

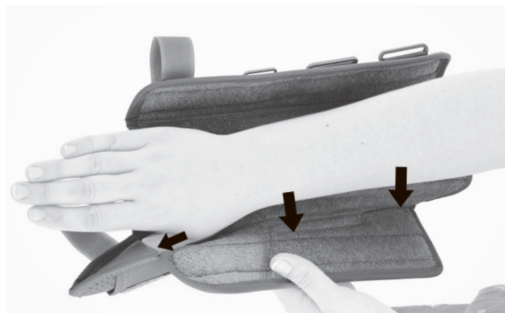


2. **PL:** Załóż ortezę na rękę.
Uwaga! Przed założeniem wyrobu pacjentowi, należy precyzyjnie dopasować wszystkie usztywnienia zainstalowane w ortezie w celu uzyskania pożądanego ustawienia zabezpieczonego stawu lub innej części ciała.


EN: Put the brace on your hand.
Attention! Before putting the brace on a patient, it is necessary to precisely adjust all the elements installed in the product in order to obtain the desired positioning of the secured joint or other part of the body.

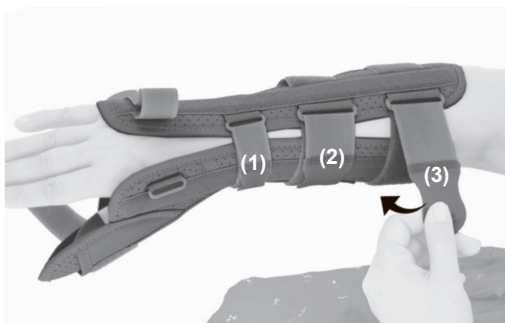

3. **PL:** Przeplęć paski przez klamerki i zapnij na rzepy według podanej kolejności (1,2,3).
EN: Interlace the straps through the buckles and fasten with Velcros according to the following steps (1,2,3).

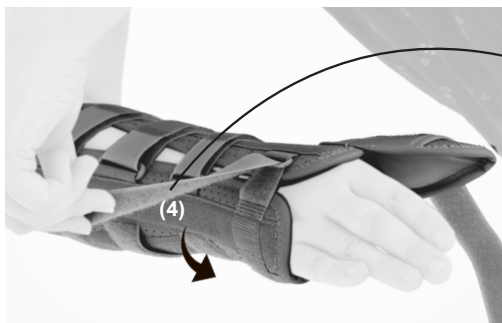

- 4. PL:** Zapnij rzep (4). Jeśli jest taka potrzeba odetnij nadmiar rzepa.
EN: Fasten with Velcro (4). If necessary, cut off any excess Velcro.

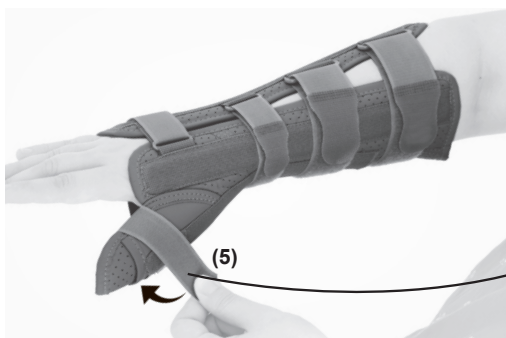

- 5. PL:** Zapnij rzep obwodowy kciuka (5). Jeśli jest taka potrzeba odetnij nadmiar rzepa.
EN: Fasten the thumb wrap-around strap (5). If necessary, cut off any excess Velcro.



- 6. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.