

KOD KATALOGOWY	OKD-07
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ OKD-07
CODE	OKD-07
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT OKD-07



1. PL: Rozepnij ortezę i przyłóż do nogi w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okolorzepakowym (1), a zegary szyny znajdowały się w osi stawu kolanowego.

EN: Unfasten the brace and put it on the leg in such a way that the kneecap is in the patellar donut (1) and the drop locks are in the axis of the knee joint.



2. PL: Zapnij ortezę z tyłu na rzepy (2,3).

EN: Fasten the brace at the back with Velcro (2,3).



3. PL: Przepleć taśmy przez klamery i zapnij w podanej kolejności (4,5,6,7).

EN: Fasten the Velcro straps according to the following steps (4,5,6,7).



4. PL: Przepleć taśmy przez klamery i zapnij w podanej kolejności (8,9,10,11).

EN: Fasten the Velcro straps according to the following steps (8,9,10,11).



- 5. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.