


| | |
|----------------|-----------------------|
| KOD KATALOGOWY | AM-PPB |
| NAZWA HANDLOWA | ORTEZA TUŁOWIA |
| MODEL | ORTEZA TUŁOWIA AM-PPB |
| | |
| CODE | AM-PPB |
| TRADE NAME | TORSO SUPPORT |
| MODEL | TORSO SUPPORT AM-PPB |

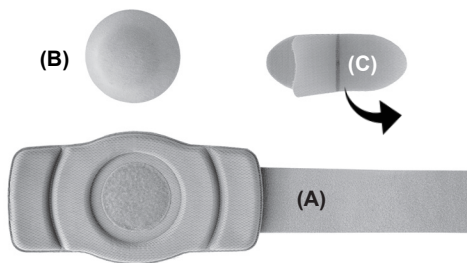


- PL:** A. Pas przepuklinowy
 B. Pelota silikonowa
 C. Rzep
- EN:** A. Hernia belt
 B. Silicone pad
 C. Velcro

1. PL: Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace.



2. PL: Przypnij pelotę silikonową (B), do pasa (A) na rzep (1). Przyłóż pelotę w miejscu przepukliny (2).
EN: Attach the silicone pad (B) to the strap (A) with Velcro (1). Put the pad on the hernia (2).

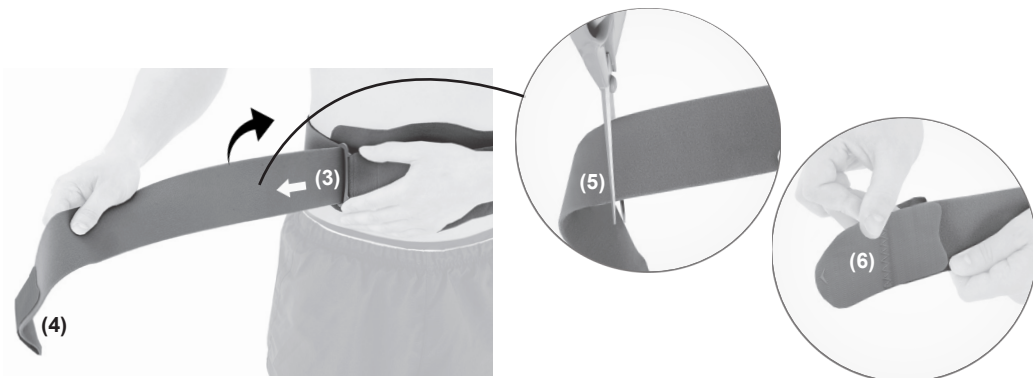

3. PL: Przepleć pas przez klamrę (3), ustaw odpowiednią kompresję i zapnij na rzep (4).
 Jeśli jest potrzeba, odetnij zbędną długość paska (5) i dopnij rzep (6).
EN: Interlace the belt through the buckle (3), set the appropriate compression and fasten with Velcro (4).
 If necessary, cut the needless part of the strap (5) and attach Velcro (6).



- 4. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.