



KOD KATALOGOWY	AM-SX-08
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOSTKI
MODEL	ORTEZA KOSTKI AM-SX-08
CODE	AM-SX-08
TRADE NAME	ANKLE ORTHOSIS
MODEL	ANKLE ORTHOSIS AM-SX-08

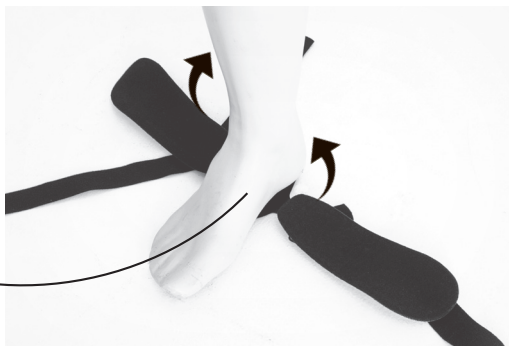

- 1. PL:** Połóż nogę na wyrobie i ustaw odpowiedni rozstaw bocznych elementów ortyzy adekwatnie do szerokości stopy.
EN: Put the foot on the brace and set the required sole width.

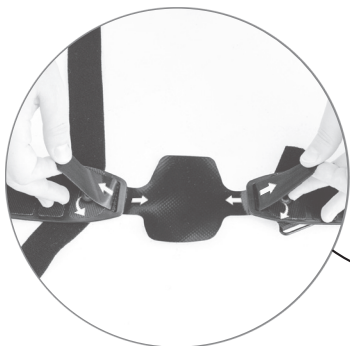

- 2. PL:** Przyłóż łuski ortyzy do stawu skokowego
EN: Put side shells to your ankle.



- 3. PL:** Zapnij pasek skokowy górny (1) według wskazanego kierunku.
EN: Fasten the upper Velcro strap (1) according to the indicated direction.



- 4. PL:** Zapnij pasy krzyżowe (2) według wskazanych kierunków.
EN: Fasten the Velcro X-straps (2) according to the indicated direction.



- 5. PL:** Zapnij pasek skokowy dolny (3) według wskazanego kierunku.
EN: Fasten the lower Velcro strap (1) according to the indicated direction.

- PL:** Jeśli jest taka potrzeba odetnij zbędną długość paska.
EN: Cut the needless part of the strap off if you need.



- 6. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.