


KOD KATALOGOWY	OKD-12
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ OKD-12
CODE	OKD-12
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT OKD-12

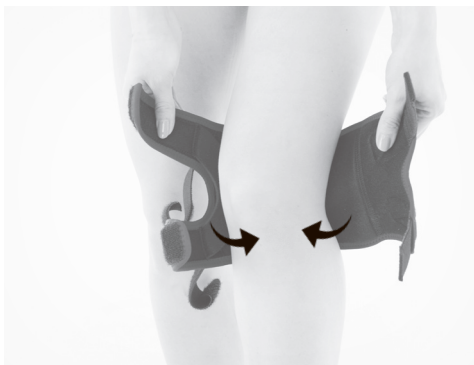

1. **PL:** Przyłóż ortezę do nogi.
EN: Place the brace on the leg.



2. **PL:** Zapnij rzepy (1) i (2).
EN: Fasten the Velcros closure (1) and (2).



3. **PL:** Zapnij taśmy obwodowe (3) i (4).
EN: Fasten the wrap-around straps (3) and (4).

4. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.