



KOD KATALOGOWY	AM-OSS-12
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOSTKI
MODEL	ORTEZA KOSTKI AM-OSS-12
CODE	AM-OSS-12
TRADE NAME	ANKLE ORTHOSIS
MODEL	ANKLE ORTHOSIS AM-OSS-12

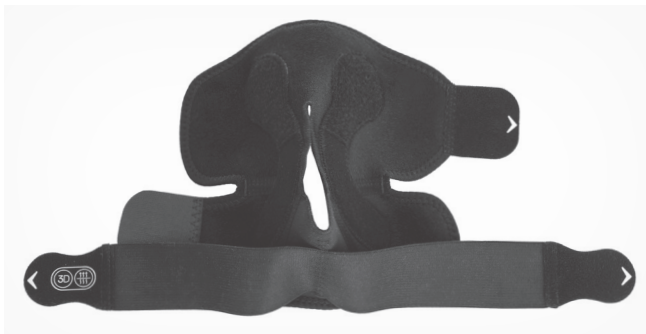


1. PL: Rozepnij ortezę i załóż na nogę w taki sposób, aby pięta znalazła się w otworze (1).

EN: Unfasten the brace and put it on the leg in such a way that the heel is placed in the special opening (1).

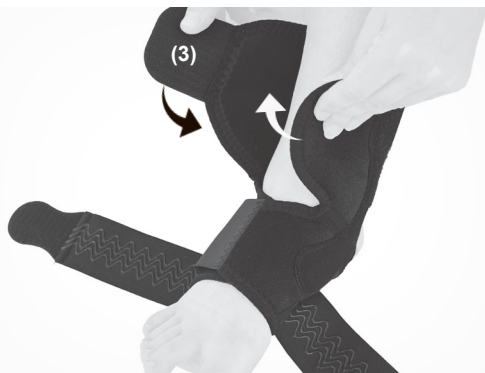

2. PL: Zapnij rzepy według numeracji (2,3).

EN: Fasten the Velcro straps according to the following steps (2,3).

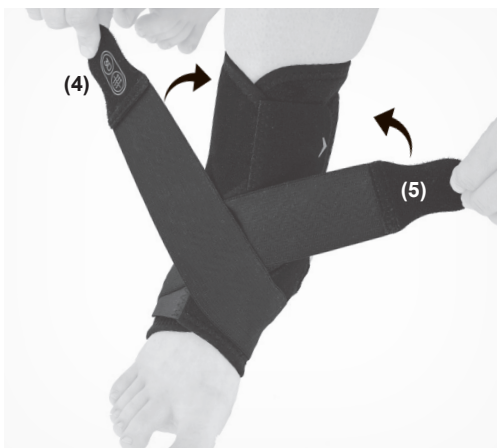

- 3. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij dociągowe pasy ósemkowe we wskazanym kierunku na rzepy (4,5).
EN: Set the proper compression and fasten the Figure-8 straps in the indicated direction with Velcro (4,5).



- 4. PL:** Gotowy wyrób.
EN: The Product is ready to use.