


KOD KATALOGOWY	RW-POWERFIT
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	RĘKAW KOMPRESYJNY STAWU KOLANOWEGO RW-POWERFIT
CODE	RW-POWERFIT
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	RW-POWERFIT

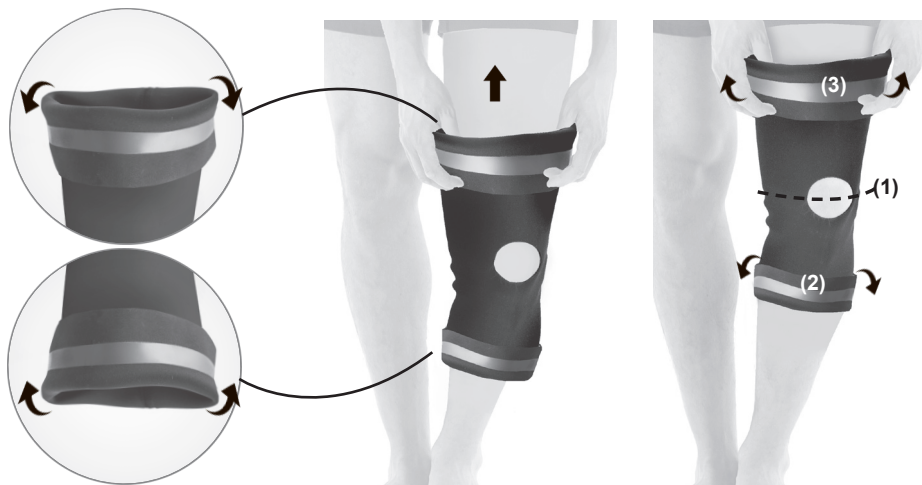

**1. PL:** Odwiń dolny i górny element ortozy w taki sposób, aby cała szerokość paska silikonowego znalazła się na zewnątrz rękawa.

**EN:** Unwrap the lower and upper part of the brace, so that the entire width of the silicone strap is outside the sleeve.

**2. PL:** Załóż rękaw na nogę w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okotorzepakowym (1). Odwiń dolny (2) i górny (3) element rękawa.

**EN:** Put the sleeve on the leg in such a way that the patella is in the patellar opening (1). Unwrap the lower (2) and upper (3) parts of the sleeve.



**3. PL:** Gotowy wyrób, na który można zastosować ortezę szkieletową.

**EN:** Product is ready. Now you can put a skeleton brace on it.