


KOD KATALOGOWY	AM-OSN-U-11
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	ORTEZA NADGARSTKA AM-OSN-U-11
CODE	AM-OSN-U-11
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	WRIST ORTHOSIS AM-OSN-U-11

PL: A. Orteza
B. Stabilizator kciuka



EN: A. Brace
B. Thumb support

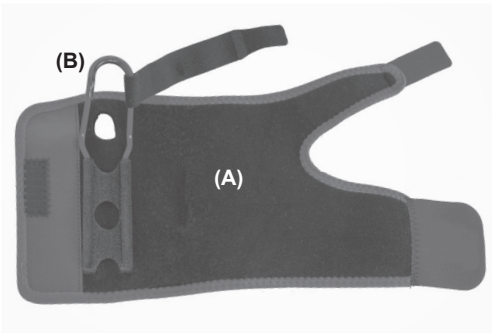

1. PL: Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace.


2. PL: Połóż rękę na ortezie (A) i umieść kciuk w otworze (1).
EN: Place your hand on the brace (A) and put your thumb in the hole (1).

PL: UWAGA! Przed założeniem wyrobu pacjentowi, należy precyzyjnie dopasować wszystkie usztywnienia zainstalowane w ortezie, w celu uzyskania pożądanego ustawienia zabezpieczonego stawu.
EN: ATTENTION! Before putting the device on, it is necessary to precisely adjust all the stiffenings installed in the brace in order to reach the desired positioning of the secured joint.

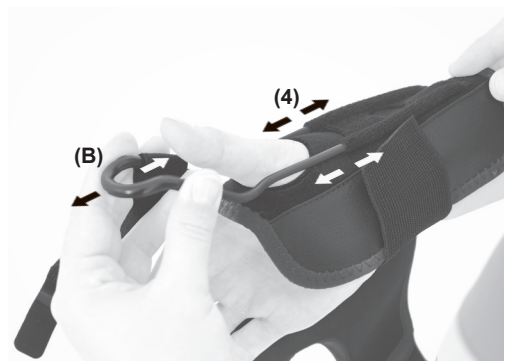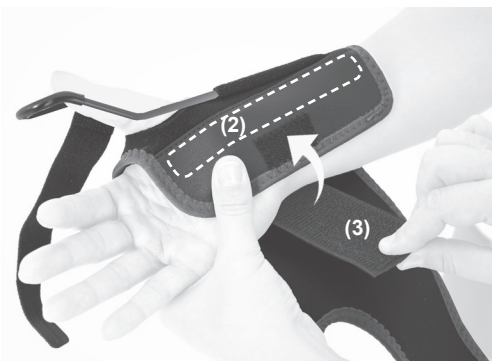



3. PL: Ustaw usztywnienie dłoniowe (2) w odpowiednim miejscu i zapnij rzep (3).
EN: Place the hand support (2) in the right place and fasten with Velcro (3).

4. PL: Ustaw stabilizator kciuka (B) na odpowiedniej wysokości, przesuwając go w górę lub w dół (4).
EN: Set the correct height (B) of the thumb support by sliding it up or down (4).

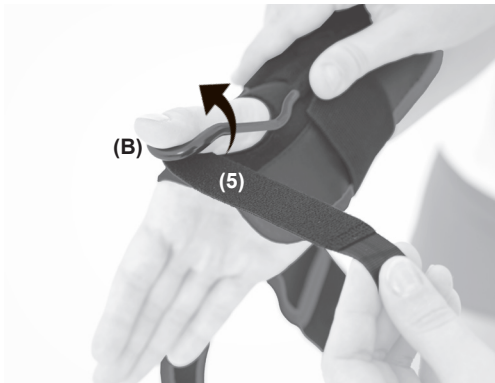

5. PL: Połóż kciuk na stabilizatorze (B) w taki sposób, aby taśma (5) zapinała się (6) na wysokości stawu międzypaliczkowego kciuka.

EN: Place your thumb on the stabilizer (B) in such a way that the strap (5) is fastened with the Velcro of the thumb (6).

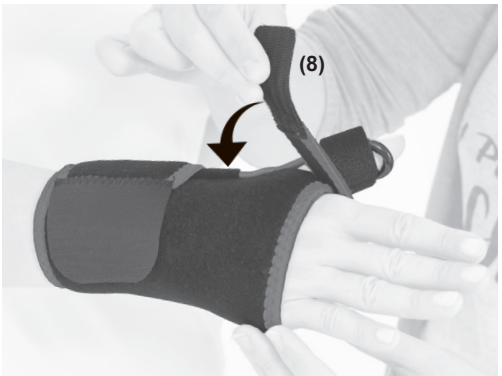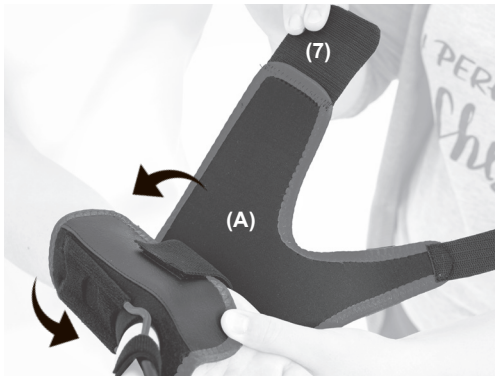

6. PL: Opleć ortezę (A) wokół nadgarstka i zapnij na rzep (7).

EN: Wrap the brace (A) around your wrist and close it with the Velcro fastener (7).

7. PL: Zapnij element śródreżca na rzep (8).

EN: Fasten the metacarpal element with Velcro (8).



8. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.