

KOD KATALOGOWY	AM-SB/1R
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ AM-SB/1R
CODE	AM-SB/1R
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT AM-SB/1R



1. **PL:** Przyłóż ortezę do nogi i ustaw zegar w zgięciu stawu.  
**EN:** Place the brace on your leg and set the drop lock the joint flexion.



2. **PL:** Zapnij ortezę w pasie (1).  
**EN:** Fasten the brace around the waist.



3. **PL:** Zapnij ortezę na udzie (2).  
**EN:** Fasten the thigh strap (2).



**PL:** UWAGA! Przy obwodzie minimalnym należy wyjąć pasek obwodowy z przelotki.

**EN:** WARNING! At the minimum circumference remove the circumference strap from the grommet.



**4. PL:** Przepleć paski (3, 4) przez klamerki i zapnij.

**EN:** Interlace the straps (3, 4) through the buckles and fasten with Velcro.



**5. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.