

KOD KATALOGOWY	AM-SP-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PALCA RĘKI
MODEL	ORTEZA PALCA RĘKI AM-SP-01
CODE	AM-SP-01
TRADE NAME	FINGER SPLINT
MODEL	FINGER SPLINT AM-SP-01



PL: UNIERUCHOMIENIE PALCÓW

II-III RĘKI LEWEJ

III-IV RĘKI PRAW EJ

IV-V RĘKI PRAW EJ

EN: IMMOBILIZATION OF FINGERS

II-III LEFT HAND

III-IV RIGHT HAND

IV-V RIGHT HAND



PL: UNIERUCHOMIENIE PALCÓW

III-IV RĘKI LEWEJ

IV-V RĘKI LEWEJ

II-III RĘKI PRAW EJ

EN: IMMOBILIZATION OF FINGERS

III-IV LEFT HAND

IV-V RIGHT HAND

II-III RIGHT HAND

1. PL: Rozepnij ortezę, wyjmij usztywnienie z tunelu, dopasuj je do ręki i wsuń w odpowiedni tunel według powyższych informacji.

EN: Unfasten the brace, remove the splint from the tunnel, adjust it to your hand and insert it into the appropriate tunnel according to the above information.


PL: UNIERUCHOMIENIE PALCÓW II-III RĘKI PRAWEJ
EN: FINGERS IMMOBILIZATION II-III OF THE RIGHT HAND



- 2. PL:** Umieść kciuk w otworze.
EN: Place your thumb in the hole.



- 3. PL:** Zapnij pasek nadgarstka na rzep (1).
EN: Fasten the Velcro wrist strap (1).

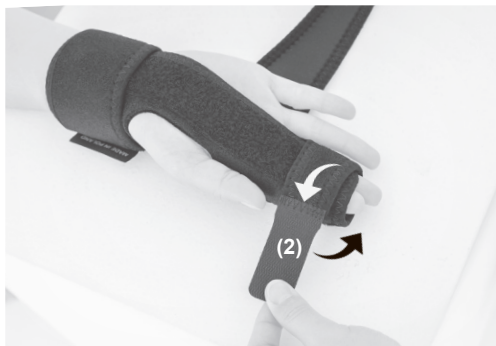

- 4. PL:** Owiń najkrótszy pasek ortozy dookoła palca wskazującego i środkowego, następnie zapnij na rzep (2).
EN: Wrap the shortest strap of the brace around your index and middle fingers, then close the Velcro fastener (2).



- 5. PL:** Zapnij pasek śródrezcza na rzep (3).
EN: Fasten the metacarpal strap with Velcro (3).



- 6. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.



PL: UNIERUCHOMIENIE PALCÓW III-IV REKI PRAWEJ

EN: FINGERS IMMOBILIZATION III-IV RIGHT HAND




- 2. PL:** Umieścić mały palec w otworze.
EN: Place the little finger in the hole.



- 3. PL:** Zapnij pasek nadgarstka na rzep (1).
EN: Fasten the Velcro wrist strap (1).



- 4. PL:** Owiń najkrótszy pasek ortozy dookoła palca środkowego i serdecznego, następnie zapnij na rzep (2).
EN: Wrap the shortest strap of the brace around your middle and ring fingers, then fasten with Velcro (2).

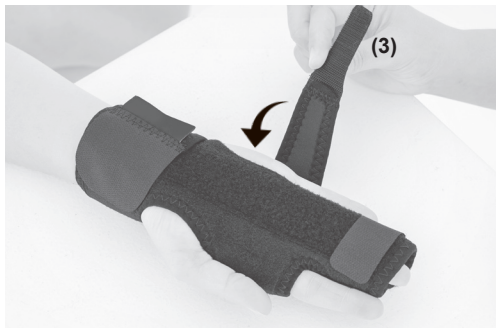


- 5. PL:** Zapnij pasek śródrezcza na rzep (3).
EN: Fasten the metacarpal strap with Velcro (3).




- 6. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.




PL: UNIERUCHOMIENIE PALCÓW IV-V RĘKI PRAWIEJ
EN: FINGERS IMMOBILIZATION IV-V RIGHT HAND

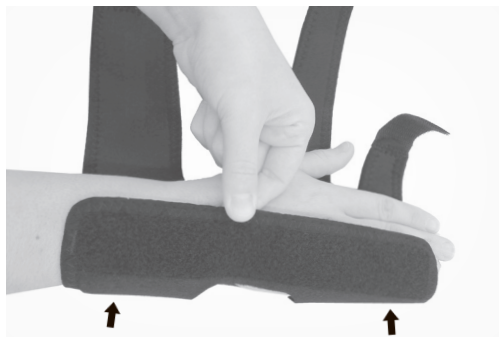

- 2. PL:** Umieść ostatnie dwa palce w ortezie.
EN: Place the last two fingers in the brace.

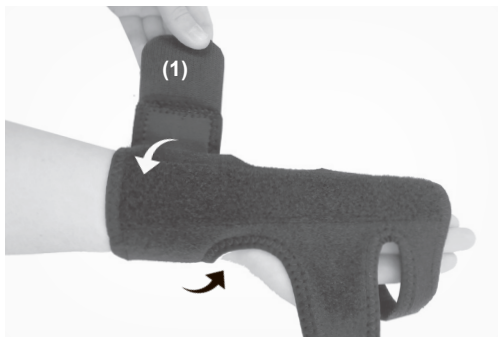

- 3. PL:** Zapnij pasek nadgarstka na rzep (1).
EN: Fasten the Velcro wrist strap (1).

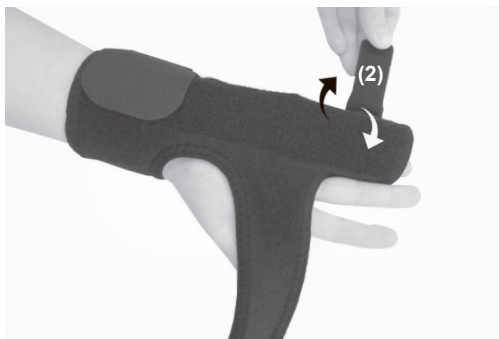

- 4. PL:** Owiń najkrótszy pasek ortezy dookoła małego i serdecznego palca, następnie zapnij rzep (2).
EN: Wrap the shortest strap of the brace around the little and ring fingers, then close the Velcro fastener (2).



- 5. PL:** Zapnij pasek śródrečza na rzep (3).
EN: Fasten the metacarpal strap with Velcro (3).



- 6. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.

