



KOD KATALOGOWY	OKD-18
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ OKD-18
CODE	OKD-18
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT OKD-18



1. **PL:** Przyłóż ortezę do nogi w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okołorzepkowym.
EN: Put the brace to your leg keeping the kneecap in the patellar donut.



2. **PL:** Zapnij tylne rzepy elastyczne w podanej kolejności (1) i (2).
EN: Fasten rear elastic Velcro straps as the following steps (1) and (2).

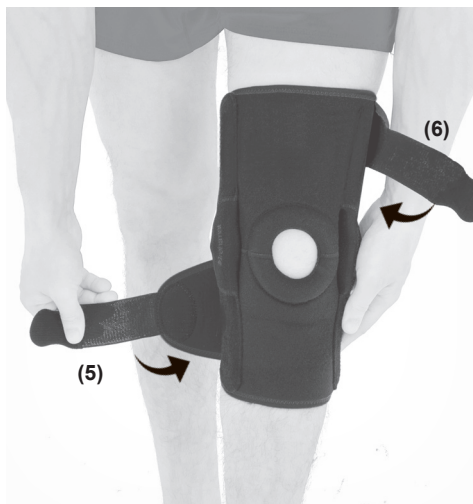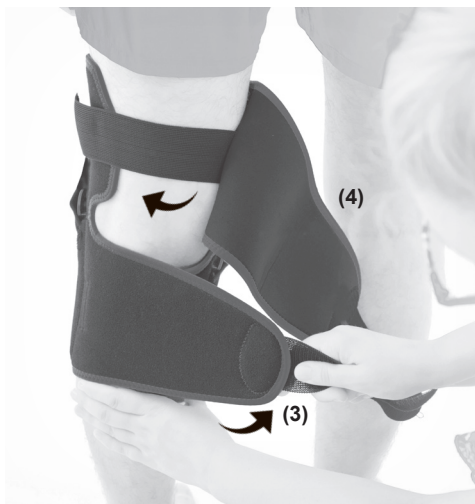

3. **PL:** Zapnij rzepy w podanej kolejności (3,4,5,6).
EN: Fasten the Velcro according to the following steps (3,4,5,6).



4. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.