



Jeżeli zachodzi potrzeba dodatkowego ustabilizowania pasów obwodowych w orcie, należy postępować w poniższy sposób:




1. Założyć ortezę na staw kolanowy wymagający zabezpieczenia.

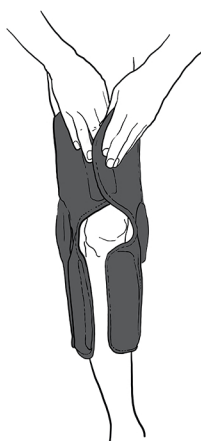

2. Ustawić ortezę w taki sposób, aby rzepka znalazła się we właściwym otworze. Zapiąć ortezę zapięciami velcro.

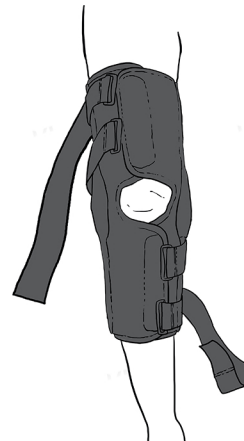


3. Przypiąć pasy obwodowe do kanałów szyn z tej strony, z której nam odpowiada.

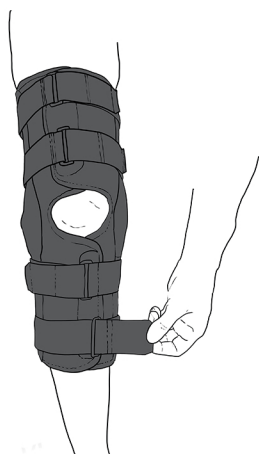

4. Zapiąć pasy przeplatając je przez przednie klamry.



5. Zaznaczyć na taśmach miejsca, w których stykają się one z kanałami szyn, do których nie są przypięte.

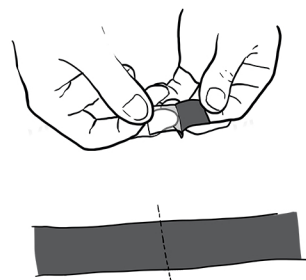

6. Zdjąć taśmy i rozłożyć na płaskiej powierzchni stroną szczerpną do dołu. Wyjąć z woreczka gripper z klejem i odlepić z nich folię zabezpieczającą.



7. W miejscach wcześniej zaznaczonych przykleić gripper do taśm obwodowych i mocno docisnąć