


KOD KATALOGOWY	OSS-OS-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA STOPY
MODEL	ORTEZA STOPY OSS-OS-02
CODE	OSS-OS-02
TRADE NAME	FOOT ORTHOSIS
MODEL	FOOT ORTHOSIS OSS-OS-02




- 1. PL:** Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace.



- 2. PL:** Za pomocą uchwytu (1) załóż ortezę na nogę, ustaw odpowiednią kompresję i zapnij rzep (2).
EN: Using the handle (1), put the brace on the leg, set the appropriate compression and fasten the Velcro (2).

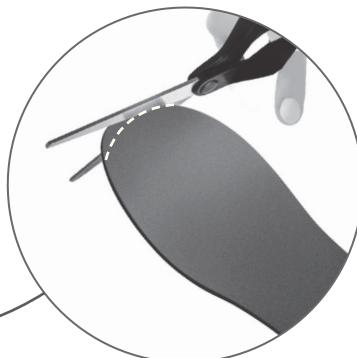

- 3. PL:** Jeśli istnieje potrzeba, dokonaj regulacji miejsca przypięcia wkładki (3) i przytnij ją.
EN: If there is a need, adjust the insertion point (3) and cut it.

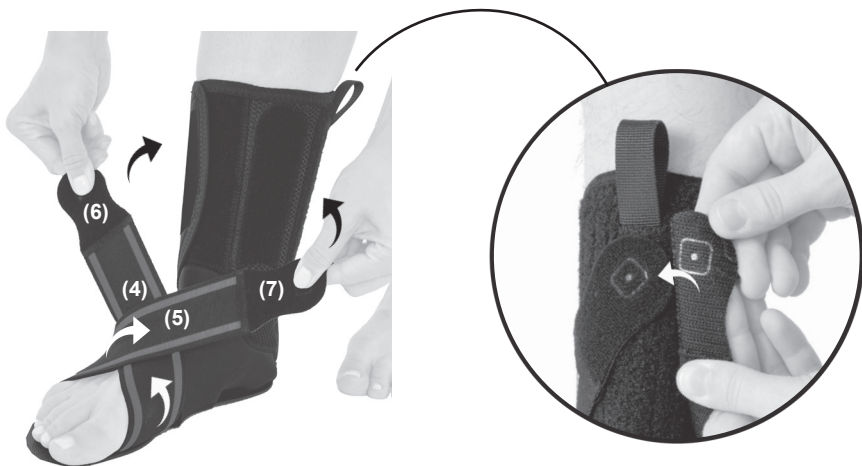

4. PL: Ustaw odpowiednie napięcie i zapnij pasy ósemkowe (4,5) na rzepy (6,7) według wskazanego kierunku.

EN: Set the appropriate tension and fasten the figure-eight straps (4,5) with the Velcro fasteners (6,7) in the indicated direction.



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.