
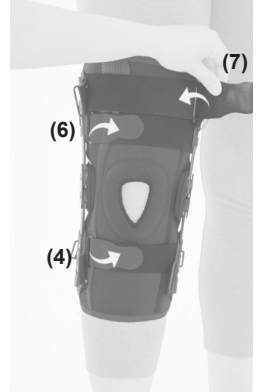


KOD KATALOGOWY	OKD-23
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ OKD-23
CODE	OKD-23
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT OKD-23

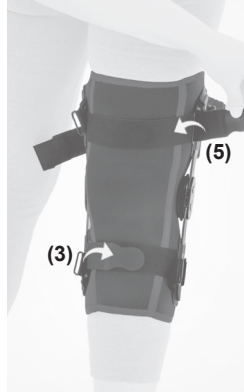


**1. PL:** Rozepnij paski, załóż ortezę na nogę i podciągnij do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okółorzepkowym (1) a zegary znajdowały się w osi stawu kolanowego. Następnie zapnij rzep (2).

**EN:** Unfasten the straps, put the brace on your leg and pull it up, so that the kneecap is in the patellar opening (1) with the drop locks in the axis of the knee joint. Then close the Velcro (2).

**2. PL:** Przepleć taśmy przez klamkerki i zapnij na rzepy w podanej kolejności (3,4,5,6,7).

**EN:** Interlace the straps through the buckles and fasten them according to the following steps (3,4,5,6,7).

## ACL

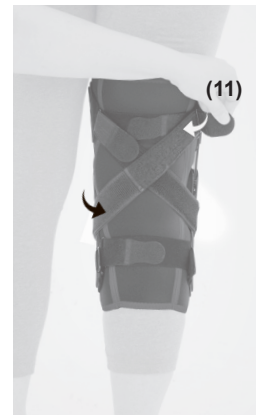


**3. PL:** Zapnij pasy rzepowe (8,9,10,11) według wskazanej kolejności.

**EN:** Fasten the Velcro straps (8,9,10,11) according to the following steps.



4. **PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.

## PCL

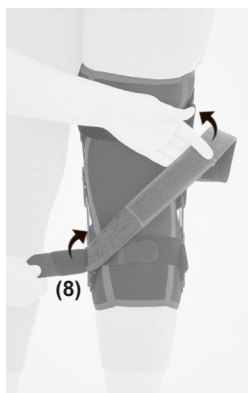


3. **PL:** Zapnij pasy rzepowe (8,9,10,11) według wskazanej kolejności.  
**EN:** Fasten the Velcro straps (8,9,10,11) according to the following steps.

4. **PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.



## MCL

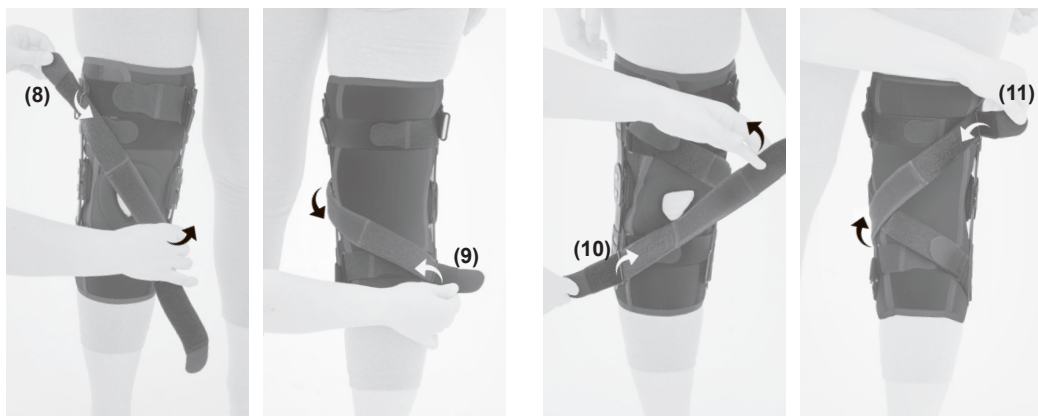

**3. PL:** Zapnij pasy rzepowe (8,9,10,11) według wskazanej kolejności.


**EN:** Fasten the Velcro straps (8,9,10,11) according to the following steps.



**4. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.

## LCL

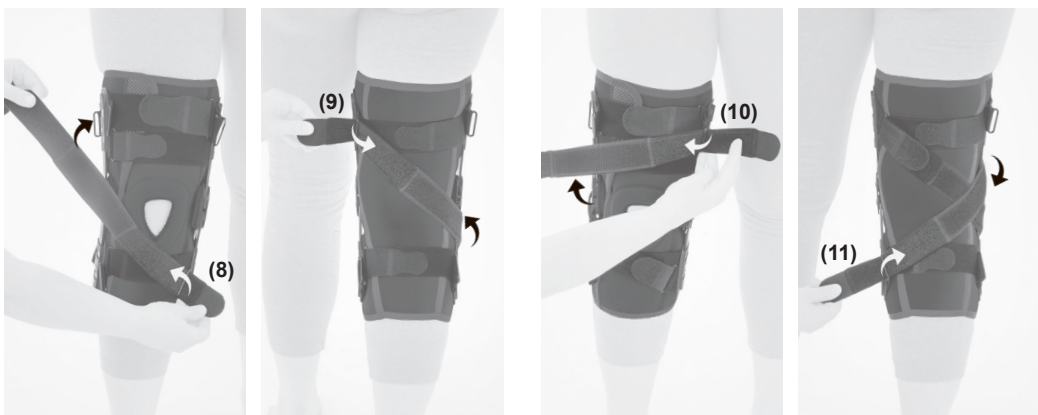

**3. PL:** Zapnij pasy rzepowe (8,9,10,11) według wskazanej kolejności.

**EN:** Fasten the Velcro straps (8,9,10,11) according to the following steps.



- 4. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.