



KOD KATALOGOWY	OKD-23
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ OKD-23
CODE	OKD-23
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT OKD-23

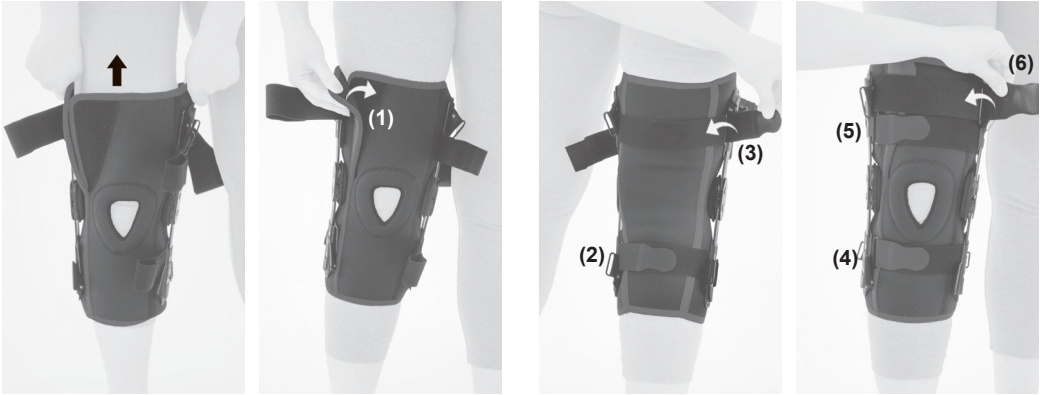

1. PL: Załóż ortezę na nogę w taki sposób, aby rzepka znalazła się w pierścieniu okółorzepkowym. Zapnij rzep (1).
EN: Place the brace on the leg to keep the kneecap in the patellar donut. Fasten with Velcro (1).

2. PL: Zapnij pasy rzepowe (2,3,4,5,6) według wskazanej kolejności.
EN: Fasten the Velcro straps (1,2,3,4,5,6) according to the following steps.

ACL

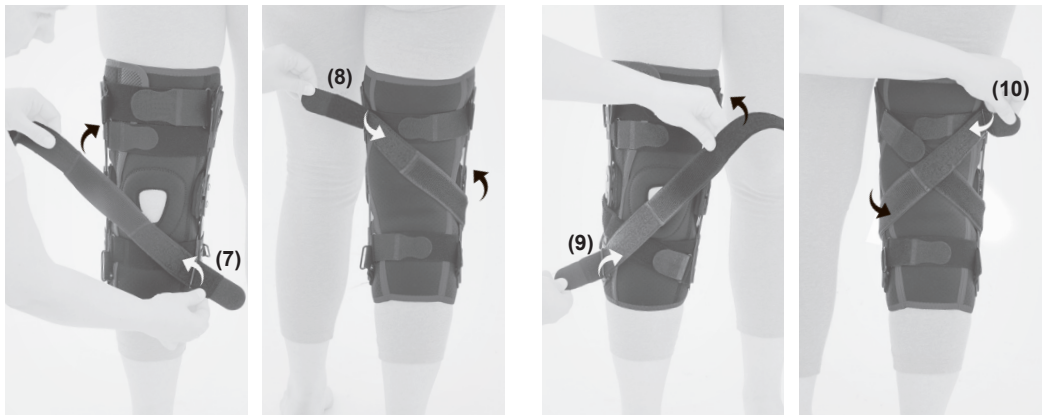


3. PL: Zapnij pasy rzepowe (7,8,9,10) według wskazanej kolejności.
EN: Fasten the Velcro straps (7,8,9,10) according to the following steps.



4. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.

PCL

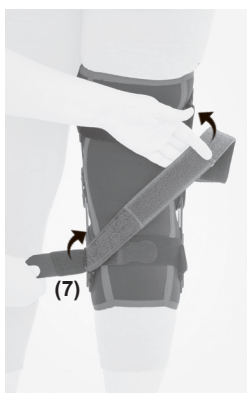


3. **PL:** Zapnij pasy rzepowe (7,8,9,10) według wskazanej kolejności.
EN: Fasten the Velcro straps (7,8,9,10) according to the following steps.

4. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.



MCL

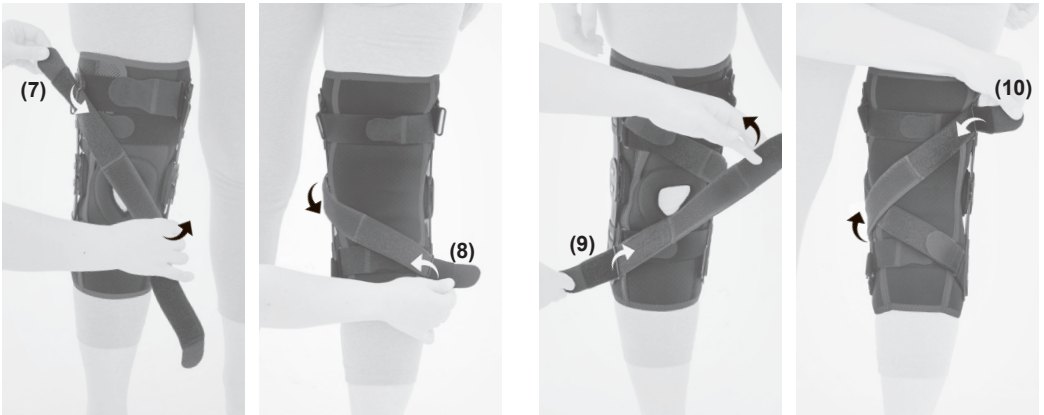

3. PL: Zapnij pasy rzepowe (7,8,9,10) według wskazanej kolejności.


EN: Fasten the Velcro straps (7,8,9,10) according to the following steps.



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.

LCL

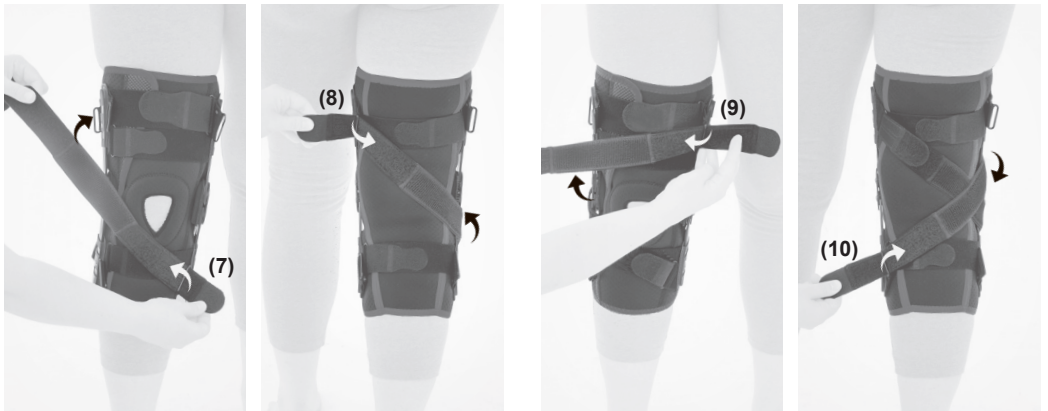

3. PL: Zapnij pasy rzepowe (7,8,9,10) według wskazanej kolejności.

EN: Fasten the Velcro straps (7,8,9,10) according to the following steps.



4. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.