

KOD KATALOGOWY	AM-PES-06
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA AM-PES-06
CODE	AM-PES-06
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT AM-PES-06



1. **PL:** Załóż ortezę na ramiona.
EN: Put the orthosis on your shoulders.



2. **PL:** Zapnij przednią część ortozy na rzep.
EN: Fasten on velcro the front part of the orthosis.



- 3. PL:** Zapnij pasy dociągowe
EN: Fasten the tension belts.



- 4. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję szelek i przypnij do zapięcia z przodu.
EN: Set the appropriate belts compression and fasten on the front.



- 5. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.