


KOD KATALOGOWY	OKG-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ OKG-02
CODE	OKG-02
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	UPPER-EXTREMITY SUPPORT OKG-02




(A)

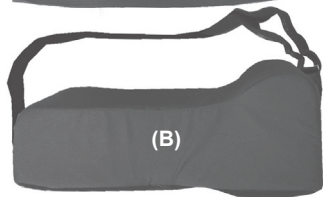


(B)

PL: (A) Temblak
(B) Poduszka odwodząca (30°)

EN: (A) Sling
(B) Abduction cushion (30°)

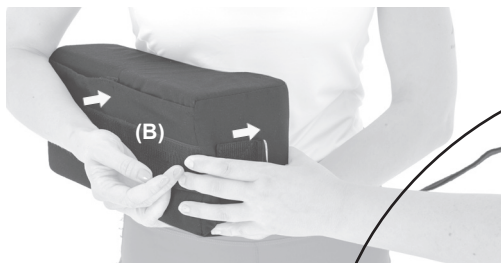


(B)

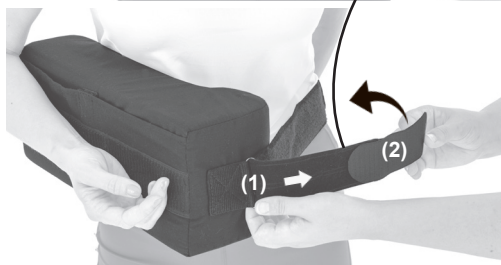

(1)

(2)

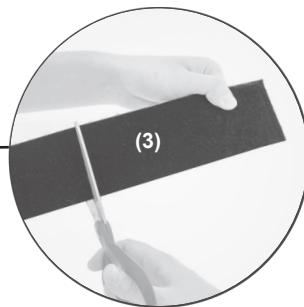


(3)




(4)

1. PL: Przyłóż poduszkę (B) do tułowia. Przelóż pas przez klamrę (1) i zapnij rzep (2). Jeśli istnieje potrzeba, odetnij zbędną długość pasa (3). Następnie ponownie przypnij rzep (4).

EN: Place the cushion on your trunk (1). Interlace the belt through the buckle (1) and fasten the Velcro (2). If necessary, cut off any excess length of belt (3). Then reattach the Velcro (4).

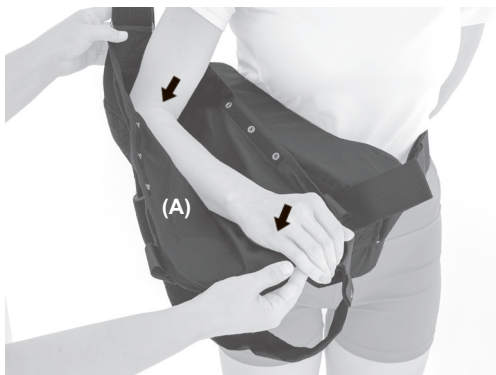

- 2. PL:** Umieść rękę w temblaku (A).
EN: Put your hand in the sling (A).

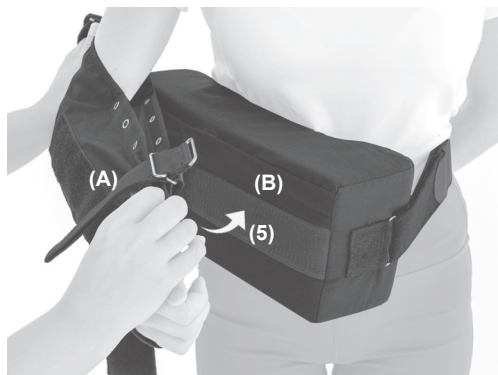

- 3. PL:** Przytnij temblak (A) do poduszki (B) na rzep (5).
EN: Attach the sling (B) to the cushion (A) with Velcro (5).




- 4. PL:** Umieść kciuk w pętli (6) i dopasuj długość taśmy na kciuk za pomocą rzepa bocznego (7).
EN: Place your thumb in the loop (6) and adjust the required length on the thumb loop (7).




- 5. PL:** Zapnij zatrzaski (8).
EN: Close the sling (8).



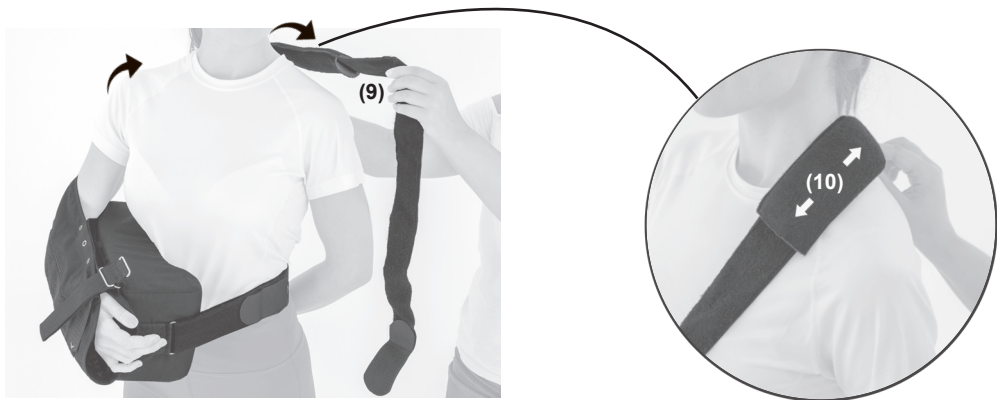

- 6. PL:** Przełóż pas przez ramię (9) i ustaw osłonę szyi (10) w odpowiednim miejscu.
EN: Place the belt through the shoulder (9) and put it in the neck cover (10).

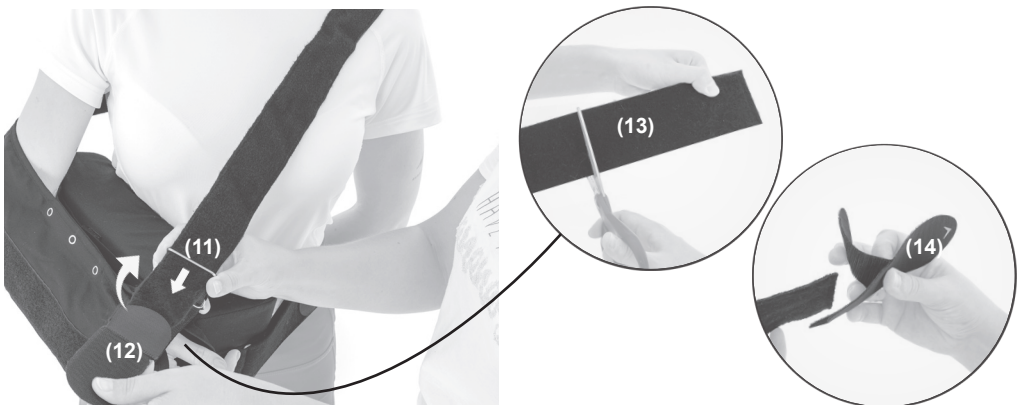

- 7. PL:** Przepleć pas przez klamrę (11) i zapnij na rzep (12). Jeśli istnieje potrzeba, odetnij zbędną długość taśmy (13). Następnie ponownie przypnij rzep (14).
EN: Attach the belt to the sling (11) and fasten the Velcro (12). If necessary, cut off any excess length of tape (13). Then reattach the Velcro (14).



- 8. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.