

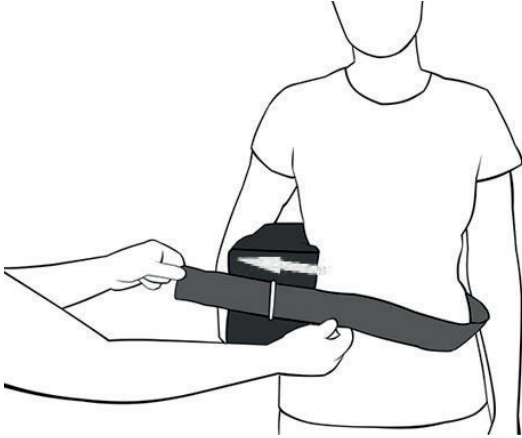



KOD KATALOGOWY	OKG-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KONCZYZNY GÓRNEJ
MODEL	OKG-02
CODE	OKG-02
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	OKG-02

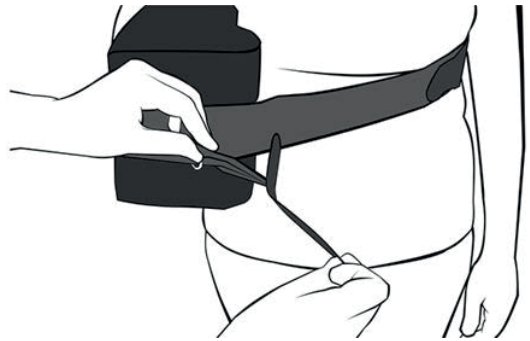


- PL:** Ustaw poduszkę do tułowia i przełóż pas przez kłamek.
EN: Position the cushion and place the belt through the buckle.

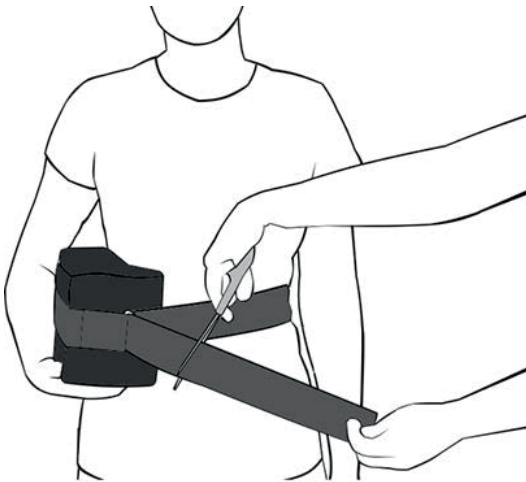


- PL:** Odetnij zbędną długość pasa i dopnij końcówkę z rzepa haczyka.
EN: Cut the excessive material off and attach the velcro.

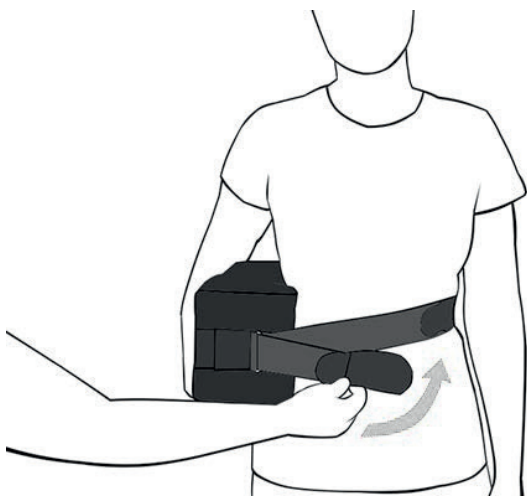


3. **PL:** Zapnij pas.
EN: Fasten the belt.

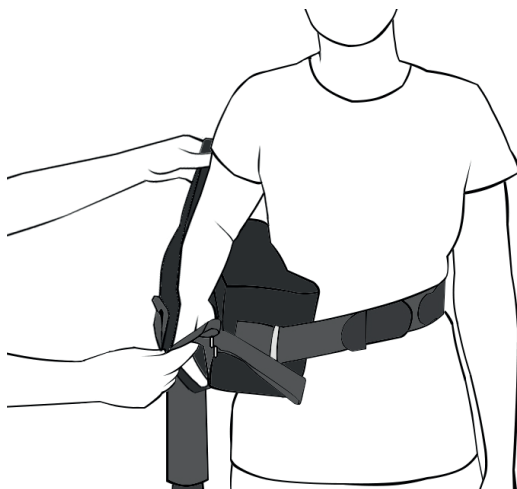


4. **PL:** Załóż rękaw i przypnij do poduszki.
EN: Put the forearm to the sling and attach to the cushion.

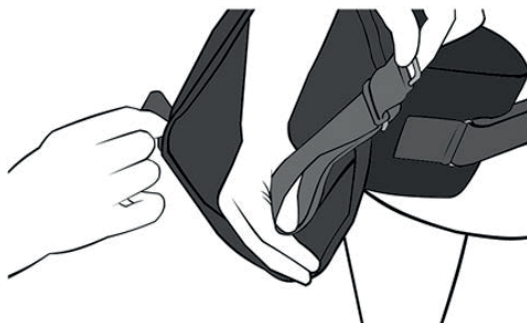


5. **PL:** Umieść kciuk w pętli.
EN: Place your thumb in the loop.

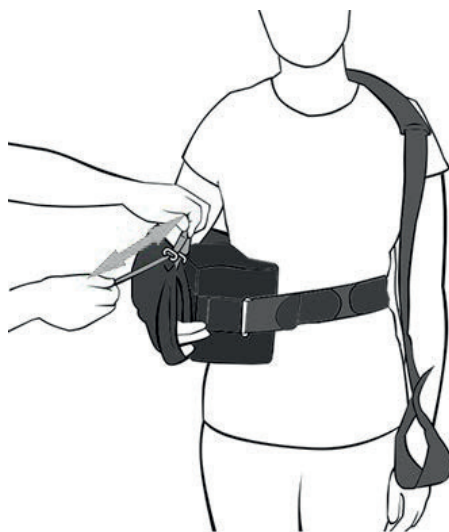



6. **PL:** Dopasuj długość taśmy na kciuk za pomocą rzepa bocznego.
EN: Adjust the required length on the thumb loop.

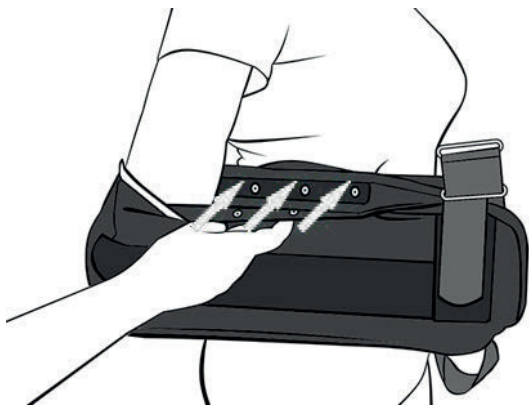


7. **PL:** Zapnij zatrzaski.
EN: Close the sling.

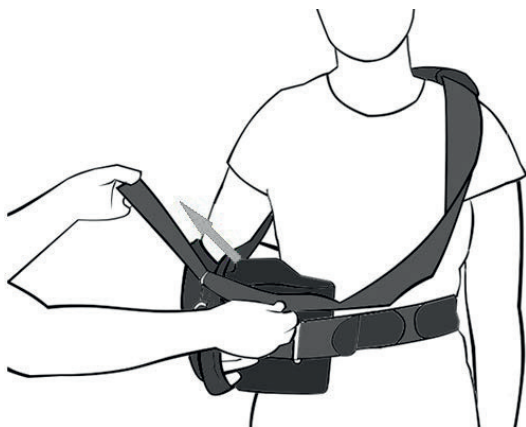

8. **PL:** Przelóż pas przez ramię i przepleć przez klamrę.
EN: Place the belt through the shoulder and connect to the sling.

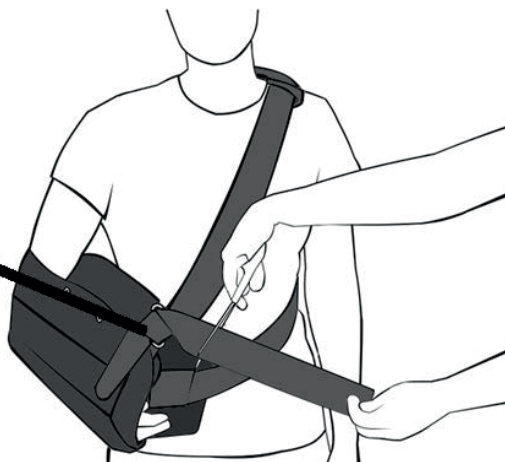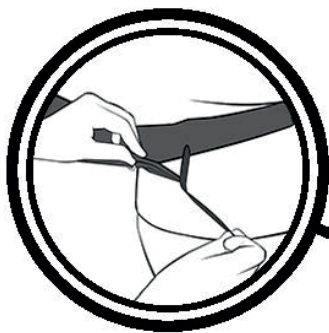

9. **PL:** Odetnij zbędną długość pasa i dopnij końcówkę z rzepem.
EN: Cut the excessive material off and attach the velcro.

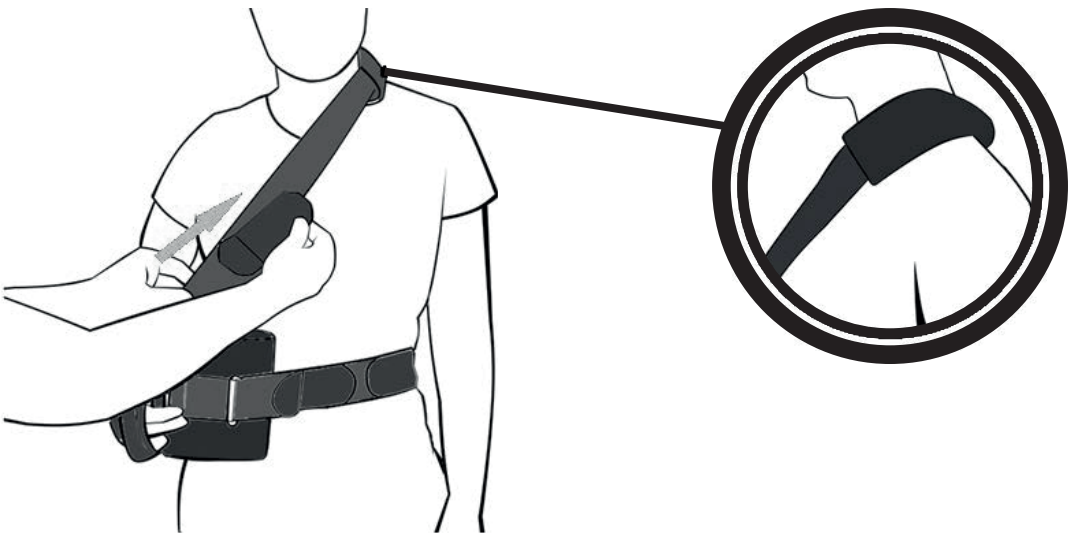

10. **PL:** Zapnij pas i ustaw osłonę szyi.
EN: Attach the velcro and the neck pad in the required position.



11. **PL:** Prawidłowo założona orteza.
EN: Product is ready to use.