



KOD KATALOGOWY	AM-WSP-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA
MODEL	AM-WSP-01
CODE	AM-WSP-01
TRADE NAME	SPINAL ORTHOSIS
MODEL	AM-WSP-01

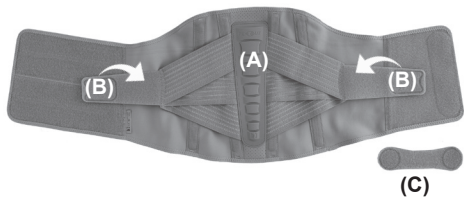

- (A) Orteza / Brace  
 (B) Pasy dociągowe / Tension belts  
 (C) Rzep zabezpieczający / Velcro fastening

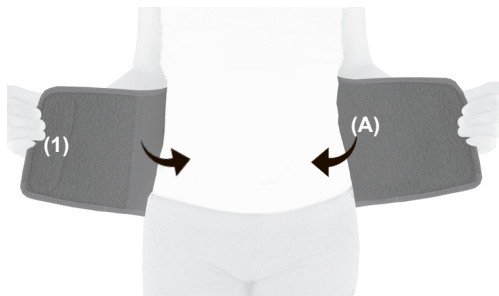

2. **PL:** Przyłóż ortezę (A) w okolice lędźwiowo-krzyżową kręgosłupa i zapnij na rzep (1).  
**EN:** Place the brace (A) on your lower back and fasten the Velcro closure (1).



3. **PL:** Jeśli jest potrzeba przypnij rzep zabezpieczający (C).  
**EN:** If necessary, fasten the additional Velcro fastener (C).



4. **PL:** Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij pasy dociągowe (B) na rzepy.  
**EN:** Set the proper compression and fasten the tension belts (B) with Velcro.



5. **PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.