



1. USTAWIENIA KĄTA ZGIĘCIA I WYPROSTU.

KĄT ZGIĘCIA/WYPROSTU ORAZ JEGO BLOKADĘ USTALA LEKARZ PROWADZĄCY LUB REHABILITANT.

Niniejsza orteza została wyposażona w dwie szyny boczne, które posiadają blokadę kąta zgięcia i wyprost w zakresie od -10 do 90 stopni z zakresem ruchomości co 10 stopni oraz istnieje możliwość zmniejszenia zakresu zgięcia do 90, 70, 40, 30 stopni lub wyprost do 30, 10, 0 lub -10 stopni. Mamy również możliwość całkowitego zablokowania szyn w zakresie od -10 do 90 stopni co 10 stopni.

1. Ustawić ortezę w przybliżonym położeniu, w którym chcemy ograniczyć zgięcie lub wyprost.
2. Nacisnąć przycisk a następnie przesunąć blokadę w pożądane miejsce z opisanym kątem.

UWAGA:

Orteza wyposażona jest w dwie szyny boczne, regulacji należy dokonać osobno na obydwu szynach, ustawiając ten sam kąt zgięcia lub wyprost.



2. MECHANIZM PRESS-SLIDE

pozwala na ustawienie odpowiedniej długości szyn 1X.

1. Wciśnij czarny przycisk blokujący.
2. Przesuń szynę do odpowiedniej długości.
3. Pamiętaj, że obie szyny muszą mieć ustawioną taką samą długość.
4. Poluzuj przycisk.

UWAGA! Przed przystąpieniem do ubioru ortozy na kończynę, sprawdź, czy mechanizm Press-Slide jest prawidłowo zablokowany.

