

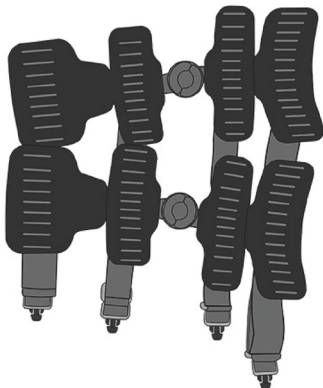


KOD KATALOGOWY	AM-KDX-01 UNIVERSO
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	AM-OSK-ZL/1
CODE	AM-KDX-01 UNIVERSO
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-OSK-ZL/1


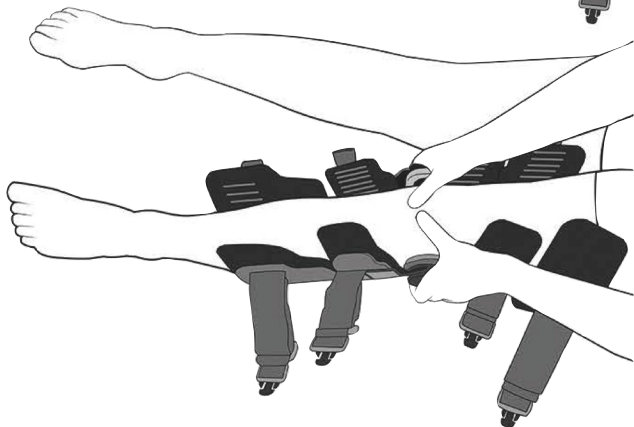


**1. PL:** Rozepnij klamry aby przygotować ortezę do założenia.  
**EN:** Unbuckle the brace.

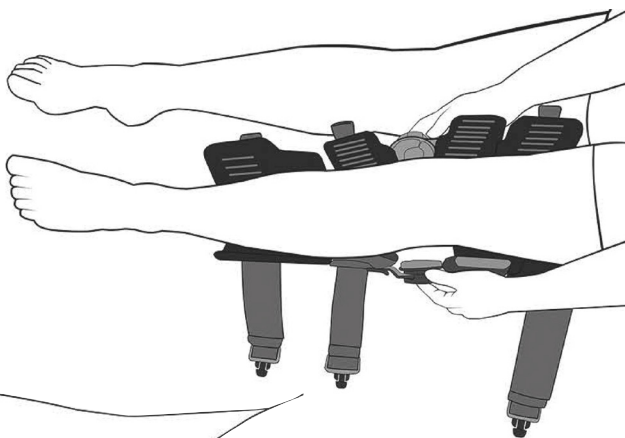


**2. PL:** Stabilizator zawsze zakładaj na siedząco. Przed zapięciem ortozy zegary powinny być ustawione dokładnie po bokach stawu kolanowego (w lini szpary stawowej) w określonym przez lekarza prowadzącego zakresie ruchomości.

**EN:** The po-op knee brace should be put while seating. Before buckle the straps ,the drop-locks should be on height of the femurs condyles (in joint space). The ROM should be adjusted according to the specialist recommendation.

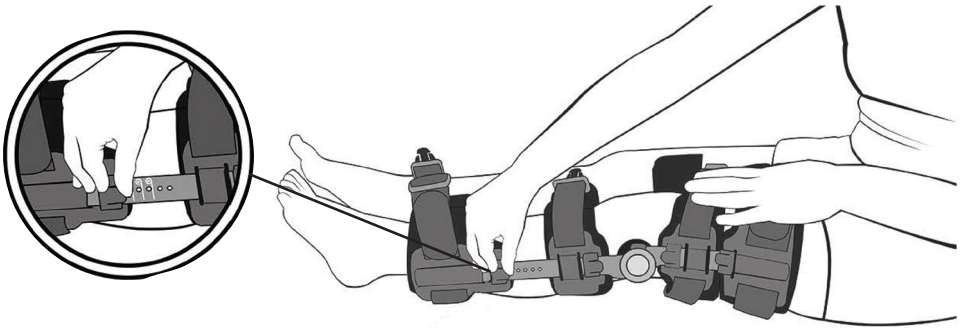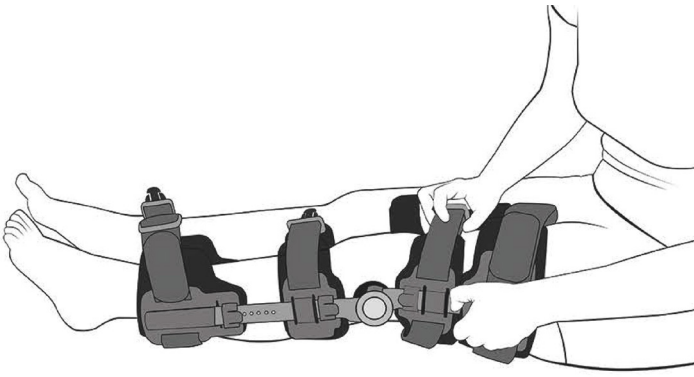


**3. PL:** Dopasuj długość ortozy. Jeśli jesteś wysoki/wysoka zwiększ długość bocznych szyn udowych i piszczelowych za pomocą innowacyjnego systemu Press-Slide.

**EN:** Adjust the length of the brace. If you are tall, lengthen the side splints by innovative Press-Slide system.

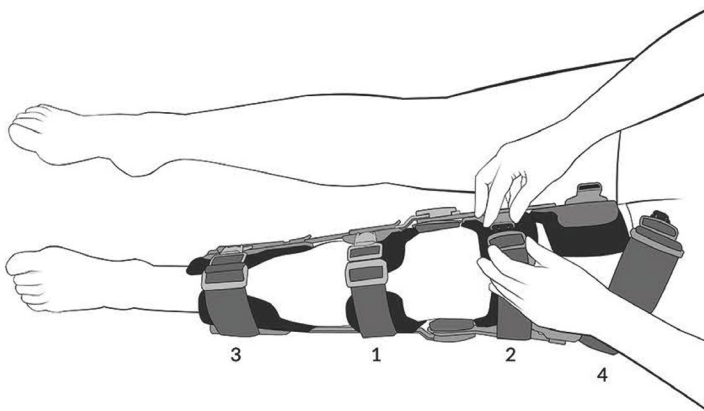


**4. PL:** Zapinanie ortozy zawsze zaczynaj od pasków leżących najbliżej stawu kolanowego. Regulowane paski powinny być takiej długości, aby po zapięciu orteza dobrze przylegała do nogi.

**EN:** First, buckle the straps which are the closest to the knee. The straps should have the appropriate length, so that the brace fits perfectly to the knee.

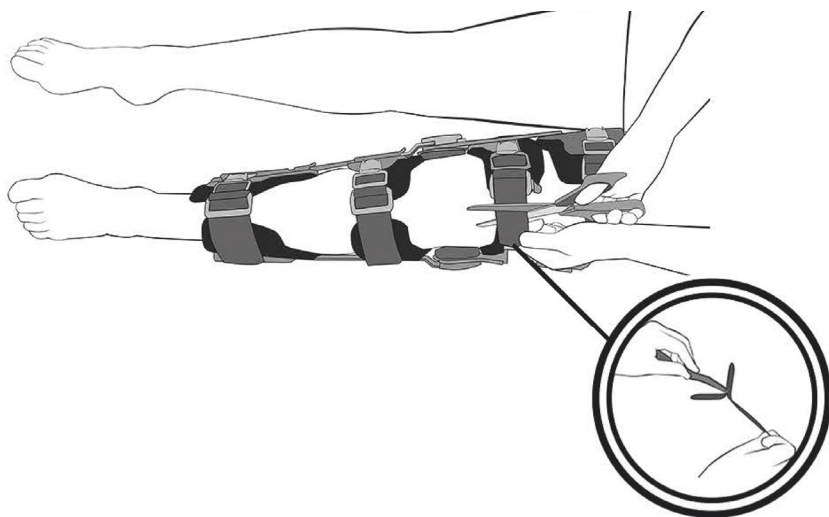

- 5. PL:** Odetnij zbędną długość pasków i zapnij rzepy.  
**EN:** Cut the needless part of straps off and fasten the Velcros.

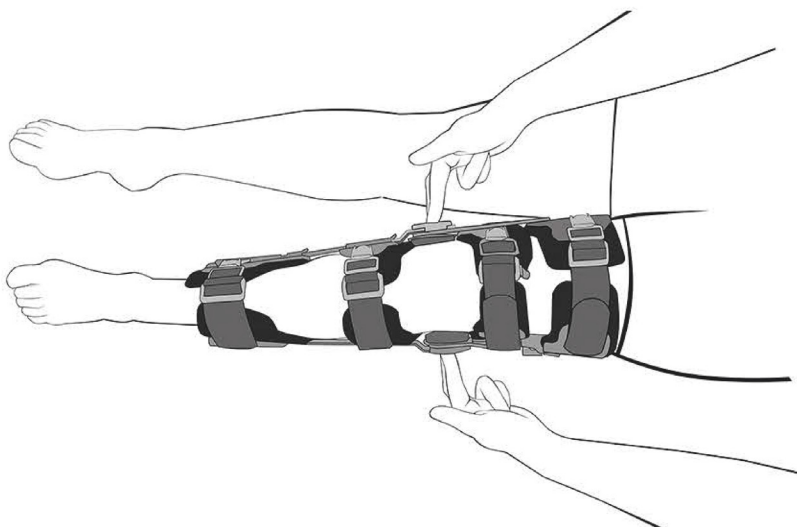

- 6. PL:** PAMIĘTAJ! Tylko prawidłowo założona orteza pozostaje w osi stawu kolanowego i przylega równomiernie do całej kończyny.  
**EN:** REMEMBER! Only correct adjustment of the knee brace provides perfect fitting!