



KOD KATALOGOWY	OT-14
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	OT-14
CODE	OT-14
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	OT-14



1. **PL:** Ustaw pas w dolnej partii pleców i zapnij z przodu na rzep (1).
EN: Place the belt on the lower back and fasten at the front with Velcro closure (1).

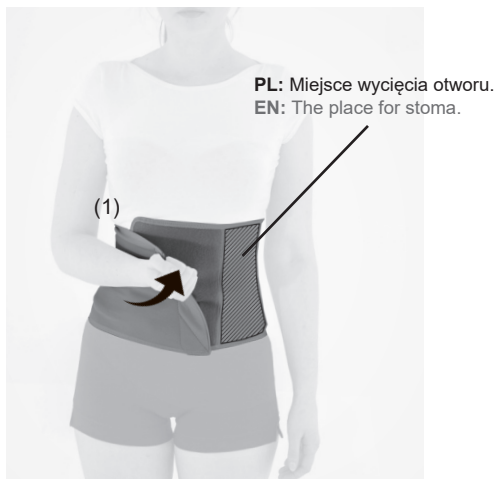

2. **PL:** Odepnij rzep (2) i zaznacz miejsce wycięcia otworu.
EN: Release the Velcro (2) and mark the hole cutout location.
3. **PL:** Zdejmij ortezę i wytnij otwór.
EN: Remove the brace and cut out the hole.

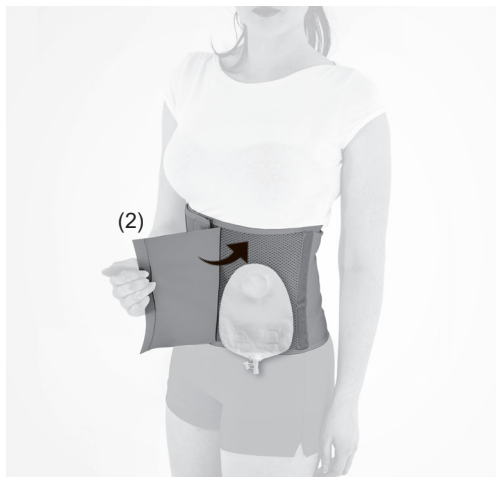

4. **PL:** Załóż ponownie ortezę: przypnij worek stomijny i zapnij rzep (2).
EN: Place the brace again: clip the ostomy bag and fasten the Velcro closure (2).



5. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.