
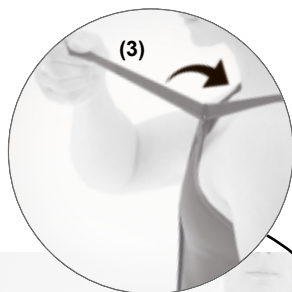


KOD KATALOGOWY	OT-16
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	OT-16
CODE	OT-16
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	OT-16

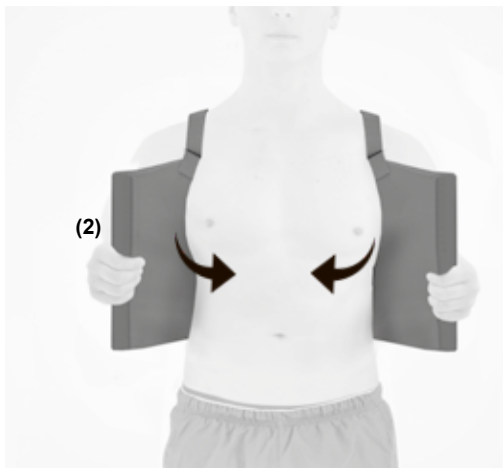

- 1. PL:** Rozepnij ortezę i poluzuj zapięcia szelek (1). Następnie załóż ją na ramiona, ustaw odpowiednią kompresję i zapnij z przodu na rzep (2).

EN: Unfasten the brace and loosen the harness fasteners (1). Then put it on your shoulders, set the appropriate compression and fasten it with Velcro at the front (2).
- 2. PL:** Ustaw odpowiednią długość szelek za pomocą rzepów (3).

EN: Adjust the length of the harness with Velcro (3).



- 3. PL:** Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.