


KOD KATALOGOWY	AM-DON-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	ORTEZA PALCA RĘKI AM-DON-01
CODE	AM-DON-01
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	WRIST ORTHOSIS AM-DON-01



1. PL: Załóż ortezę na rękę i dopasuj usztywnienie.
EN: Put the brace on the hand and adjust the stiffening.

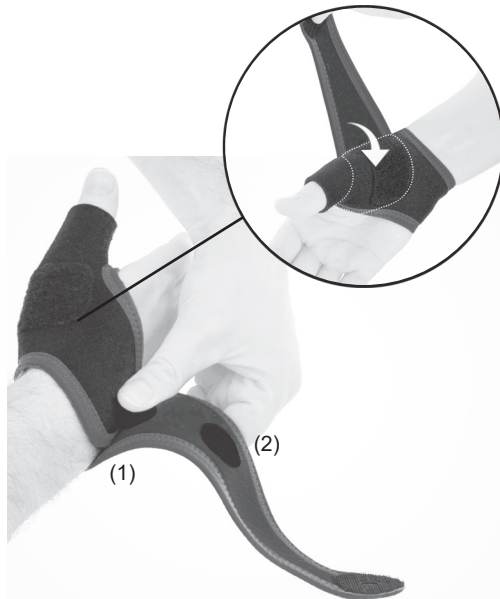

2. PL: Zapnij ortezę za pomocą rzepów (1 i 2) w taki sposób, aby zapięcie przebiegało wzdłuż usztywnienia.
EN: Fasten the brace using the Velcro circles (1 and 2), so that the fastening covers the stiffening.



3. PL: Przepleć pasek obwodowy wokół kciuka i zapnij rzep.
EN: Wrap the strap around the thumb and fasten the Velcro closure.



4. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.