



KOD KATALOGOWY	AM-SB-08
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ AM-SB-08
CODE	AM-SB-08
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT AM-SB-08

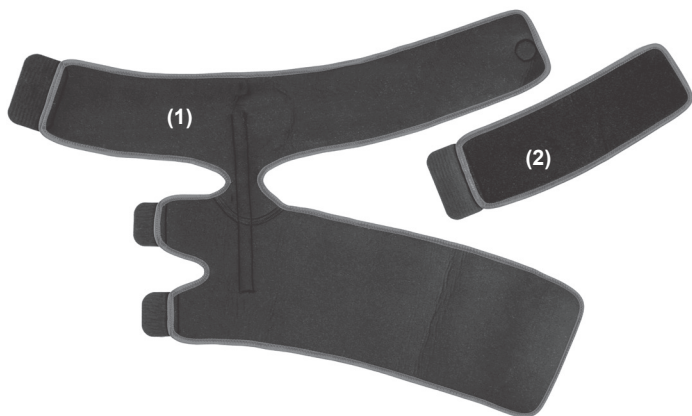

- 1. PL:** Zapnij ortezę w pasie. Jeśli obwód jest większy, dopnij element rzepowy (2) i zapnij pas.
EN: Put the brace around the waist. If your circumference is bigger, attach the additional Velcro element (2) and fasten the belt.

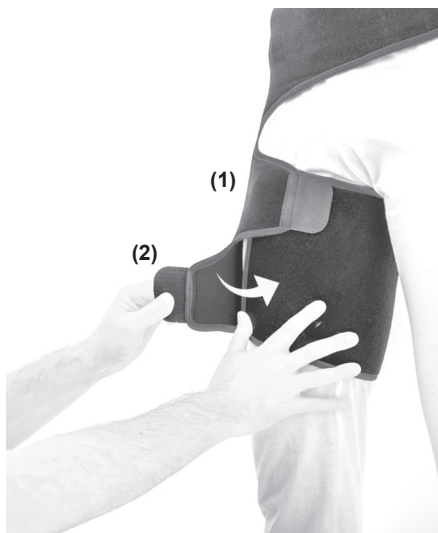

- 2. PL:** Zapnij dolne rzepy w podanej kolejności (1,2).
EN: Fasten the thigh Velcros in the following order (1,2).



- 3. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.