


| | |
|----------------|-----------------------------------|
| KOD KATALOGOWY | AM-SOB-05 |
| NAZWA HANDLOWA | ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| MODEL | ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ AM-SOB-05 |
| CODE | AM-SOB-05 |
| TRADE NAME | UPPER-EXTREMITY SUPPORT |
| MODEL | UPPER-EXTREMITY SUPPORT AM-SOB-05 |

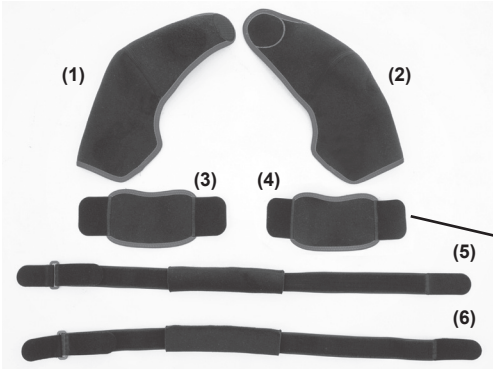

PL/EN:

- 1-2 - elementy barków/shoulder elements.
- 3-4 - pasy obwodowe ramienne/
shoulder circumferential straps.
- 5-6 - pasy krzyżowe/ X-straps.

PL: Odpowiednie ułożenie taśmy obwodowej.
EN: Appropriate setting of circumferential straps.



- 1. PL:** Umieść element (1) na ramieniu. Przytnij pas obwodowy (3) do części ramiennej ortozy i zapnij.
EN: Put the element (1) on the shoulder. Attach the circumferential strap (3) to the shoulder element of the brace and fasten it.




- 2. PL:** Umieść element (2) na drugim ramieniu. Przytnij pas obwodowy (4) do części ramiennej ortozy i zapnij.
EN: Put the element (2) on the opposite shoulder. Attach the circumferential strap (4) to the shoulder element of the brace and fasten it.


PL: I STOPIEŃ STABILIZACJI OBRECY BARKOWEJ (FAZA PRZEBUDOWY STAWU/ PROFILAKTYKA).
EN: I LEVEL OF SHOULDER STABILIZATION (RECONSTRUCTION PHASE/ PREVENTION).



- 3. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję na ramionach i zapnij tylny rzep.
EN: Set an appropriate level of shoulder compression and fasten the back Velcro.

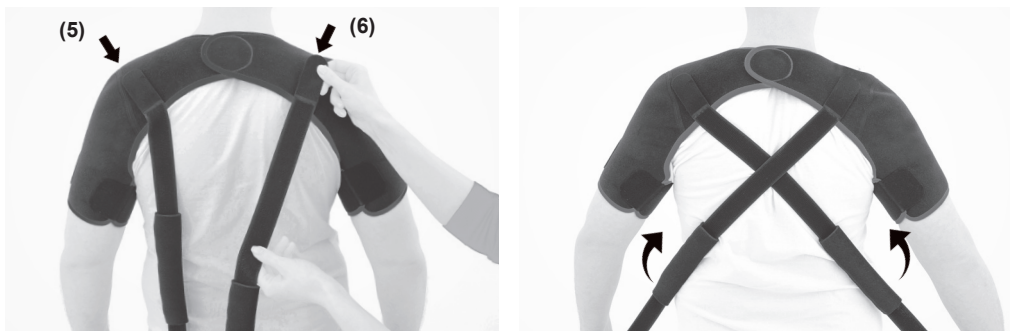

- 4. PL:** Przytnij z tyłu pasy krzyżowe (5,6) w zaprezentowany sposób.
EN: At the back, attach the X-straps (5,6) as presented in the picture.

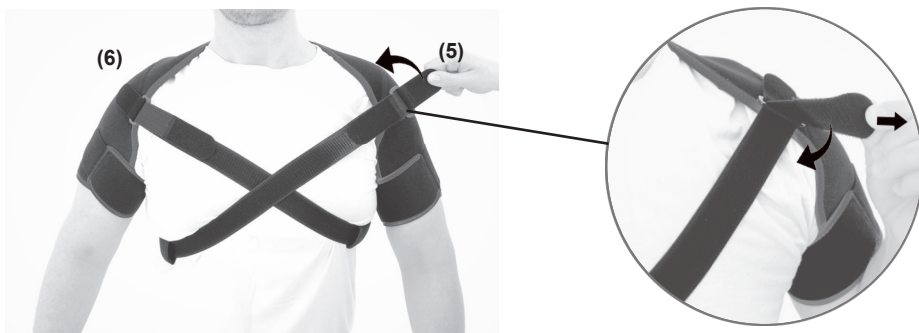

- 5. PL:** Przepleć pasy krzyżowe (5,6) przez przednie klamki i ustaw ich odpowiednią kompresję.
EN: Interlace the X-straps (5,6) with the front buckles and set their compression.

PL: II STOPIEŃ STABILIZACJI OBŁĘCZY BARKOWEJ (FAZA OSTRY).
EN: II LEVEL OF SHOULDER STABILIZATION (ACUTE PHASE).



6. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.