

KOD KATALOGOWY	OKD-38
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KONCZYNY DOLNEJ
MODEL	OKD-38
CODE	OKD-38
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	OKD-38



**1. PL:** Rozepnij ortezę i przyłóż do nogi w taki sposób, aby rzepka (1) znalazła się w otworze okółrępkowym, a zawiasy szyny znajdowały się w osi stawu kolanowego.

**EN:** Unfasten the brace and put it to your leg, keep the kneecap (1) in the patellar donut, and the splint hinges in the axis of the knee joint.



**2. PL:** Zapnij tylne pasy stabilizujące w podanej kolejności (2,3).

**EN:** Attach the rear stabilization straps as the following steps (2,3).



**3. PL:** Zapnij ortezę na rzepy w podanej kolejności (4,5,6,7).

**EN:** Fasten the brace with Velcro according as the following steps (4,5,6,7).



**4. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.