


KOD KATALOGOWY	OKG-21
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	OKG-21
CODE	OKG-21
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	OKG-21

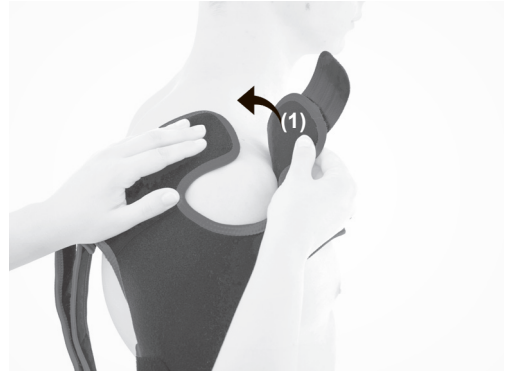

1. **PL:** Umieść ortezę na ramieniu i zapnij rzep (1).
EN: Place the brace on the shoulder and fasten the Velcro (1).



2. **PL:** Przypnij taśmę obwodową (2) do części ramiennej ortozy i zapnij. Jeśli obwód jest większy dopnij element rzepowy (3) i zapnij opaskę.
EN: Attach the element number (2) to the shoulder part of the brace. If the circumference is bigger, attach the additional Velcro element (3), attach the additional strap (3).



3. **PL:** Zapnij pas piersiowy z przodu na rzep.
EN: Fasten the chest belt at the front.

PL: TRZY MODELE STABILIZACJI RAMIENIA:
EN: THREE ARM STABILIZATION MODELS:



PL: Jeśli chcesz uzyskać odpowiednią stabilizację przypnij element ramienny (4) na rzepy w odpowiedni sposób.

EN: If you want to reach a given stabilization put the shoulder element (4) on the velcro according to the following instructions.



PL: CENTRALIZACJA BARKU.
EN: SHOULDER CENTRALIZATION.



PL: ELEWACJA BARKU.
EN: SHOULDER ELEVATION.



PL: DEPRESJA BARKU.
EN: SHOULDER DEPRESSION.



4. **PL:** Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.