



KOD KATALOGOWY	OSS-OS-02 /CCA
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ AM-OSS-24
CODE	OSS-OS-02 /CCA
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT AM-OSS-24

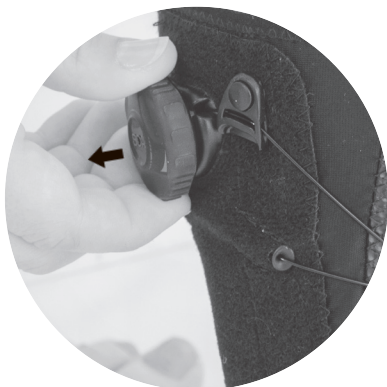

1. **PL:** Przed założeniem ortezy poluzuj system BOA.
EN: Before using the brace, loosen the BOA Fit System.



2. **PL:** Załóż orteżę na nogę i zapnij rzep.
EN: Place the brace on the leg and fasten the Velcros closures.

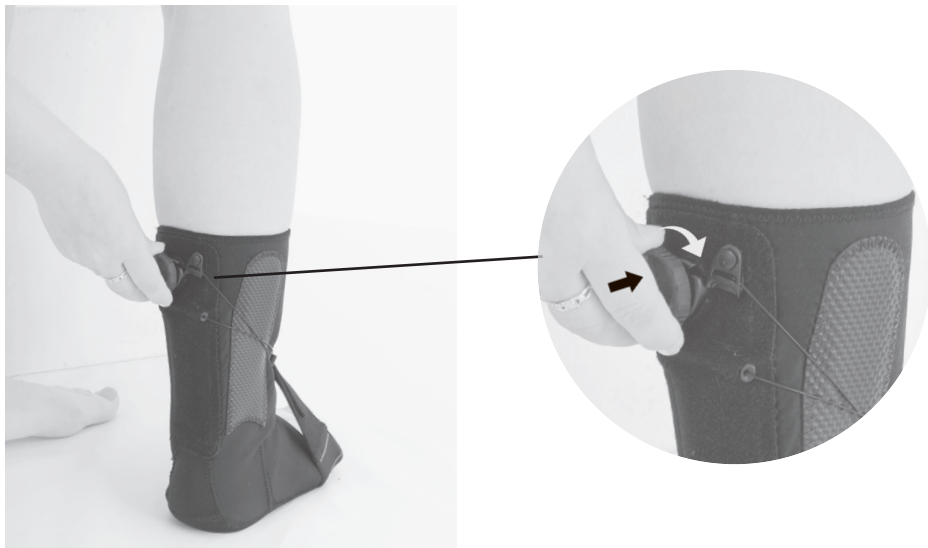

3. **PL:** Za pomocą systemu BOA ustaw odpowiednią kompresję.
UWAGA! Im mocniejsze napięcie linki, tym większa elewacja przodostopia.
EN: Adjust the required compression with the BOA Fit System.
ATTENTION! The stronger compression is, you will receive better forefoot elevation.



4. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.