



KOD KATALOGOWY	AM-BX-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ AM-BX-01
CODE	AM-BX-01
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	UPPER-EXTREMITY SUPPORT AM-BX-01

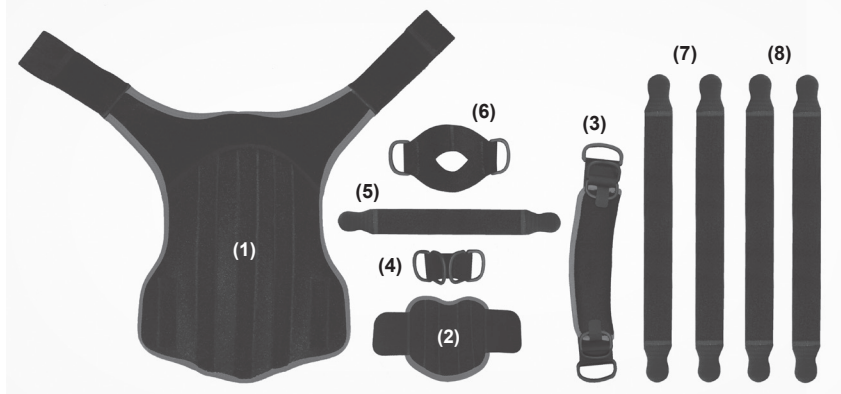

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| 1. Orteza barku/ Shoulder brace | 4. Spinacz ramienia/ Shoulder clip | 7. Pasy stabilizujące tylne/ Rear stabilizing straps |
| 2. Kapa ramienia/ Arm cover | 5. Pas ramienia/ Shoulder belt | 8. Pasy stabilizujące przednie/ Front stabilizing straps |
| 3. Kapa pachowa/ Armpit cover | 6. Kapa barkowa/ Shoulder cap | |


TRZY POZIOMY UNIERUCHOMIENIA RAMIENIA: THREE LEVELS OF SHOULDER IMMOBILIZATION:

I POZIOM UNIERUCHOMIENIA RAMIENIA I LEVEL OF SHOULDER IMMOBILIZATION

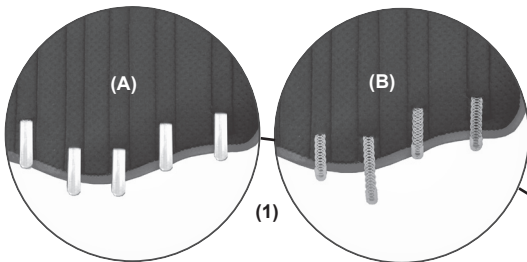


A. ALUMINIOWE STALKI
(MOCNY POZIOM STABILIZACJI)
A. ALUMINUM SPLINTS
(LARGE STABILIZATION LEVEL)

B. FISZBINY SPIRALNE
(LEKKI POZIOM STABILIZACJI)
B. SPIRAL BONINGS
(LIGHT STABILIZATION LEVEL)

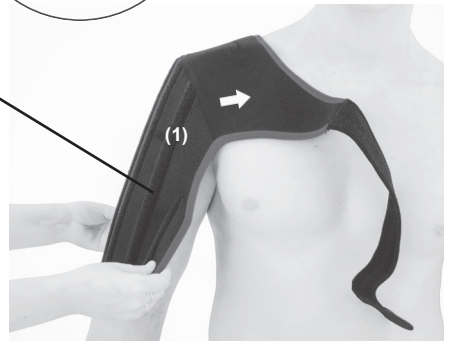

- PL:** Wybierz odpowiedni rodzaj usztywnienia (A lub B) w ortezie barku (1) i kapie ramienia (2).
EN: Choose the kind of stiffener (A or B) in the shoulder brace (1) and the arm cover (2).
- PL:** Umieść ortezę na ramieniu (1).
EN: Place the brace on the shoulder (1).

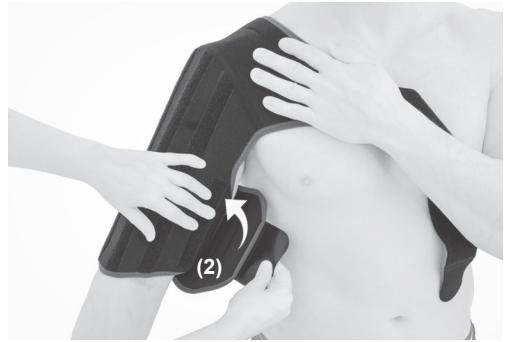



2. PL: Przypnij kapę ramienia (2) do części ramiennej ortezy i zapnij.

EN: Attach the arm cover (2) to the shoulder element of the brace and fasten it.



3. PL: Zapnij kapę pachową (3) z przodu i z tyłu na rzep.

EN: Fasten the armpit cover (3) at the front and back with Velcro.

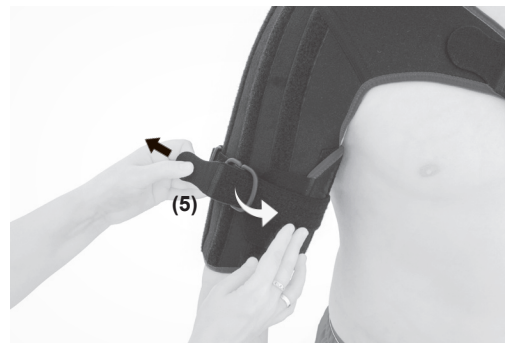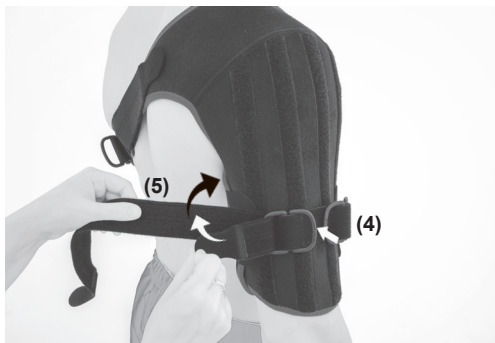


4. PL: Przypnij spinacz ramienia (4) i zapnij pas obwodowy ramienia na rzep (5).

EN: Attach the shoulder clip to the brace (4) and fasten the shoulder belt around the Velcro (5).



5. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.

II POZIOM UNIERUCHOMIENIA RAMIENIA II LEVEL OF SHOULDER IMMOBILIZATION

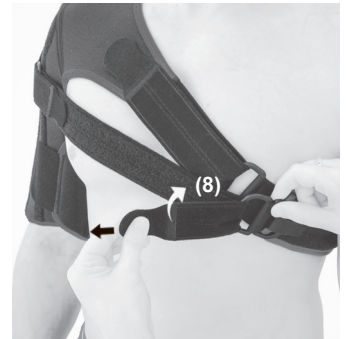

1. **PL:** Zamontuj kapę barkową do ramienia (6). Zapnij pasek stabilizujący z tyłu (7) i z przodu (8).
EN: Mount the shoulder cap to the arm (6) Fasten the stabilizing strap on the back (7) and front (8).



2. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.

III POZIOM UNIERUCHOMIENIA RAMIENIA III LEVEL OF SHOULDER IMMOBILIZATION



1. **PL:** Zapnij pasek stabilizujący z tyłu (7) i z przodu (8).
EN: Fasten the stabilizing strap on the back (7) and front (8).



2. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.