
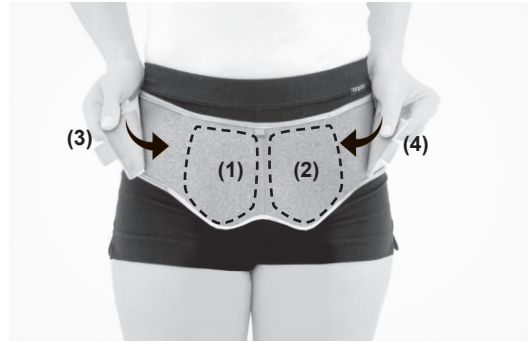


KOD KATALOGOWY	AM-2PP/D
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA AM-2PP/D
CODE	AM-2PP/D
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT AM-2PP/D

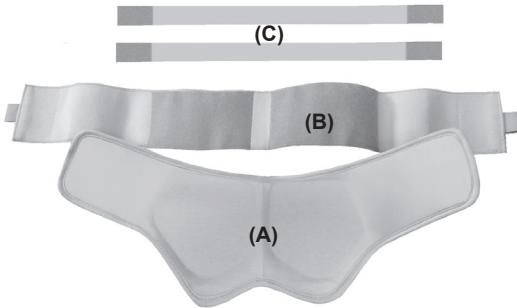

- 1. PL: Rozepnij ortezę.**
(A) Element z pelotami pachwinowymi
(B) Pas biodrowy
(C) Pasy stabilizujące

EN: Unfasten the brace
(A) Element with an inguinal pads
(B) Waist belt
(C) Stabilizing belts

- 2. PL: Przyłóż element z pelotami pachwinowymi (A) do ciała w taki sposób, aby peloty pachwinowe (1,2) znajdowały się w miejscu przepukliny. Następnie zapnij pas biodrowy (B) na rzepy (3,4).**

EN: Put the element (A) with the inguinal pads (1,2) in the place of the hernia. Then close the belt (B) with the Velcro fasteners (3,4).



- 3. PL: Ustaw odpowiedni kompresję za pomocą pasów (C), przypinając je z przodu i z tyłu na rzepy (5,6).**

EN: Stabilize the inguinal pelots with the straps (C), fastening them at the front and back with Velcro (5,6).



- 4. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.