

KOD KATALOGOWY	OT-10
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA OT-10
CODE	OT-10
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT OT-10



1. **PL:** Ustaw ortezę w dolnej partii pleców i zapnij przednią część ortozy.
EN: Put the orthosis in the lower back and fasten the front part of the orthosis.



2. **PL:** Zapnij pasy dociągowe (1,2).
EN: Fasten the tension belts (1,2).



3. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.