



KOD KATALOGOWY	AM-D-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PALCA RĘKI
MODEL	ORTEZA PALCA RĘKI AM-D-02
CODE	AM-D-02
TRADE NAME	FINGER SPLINT
MODEL	FINGER SPLINT AM-D-02



- 1. PL:** Załóż ortezę na rękę (1).  
**EN:** Place the brace on your hand (1).

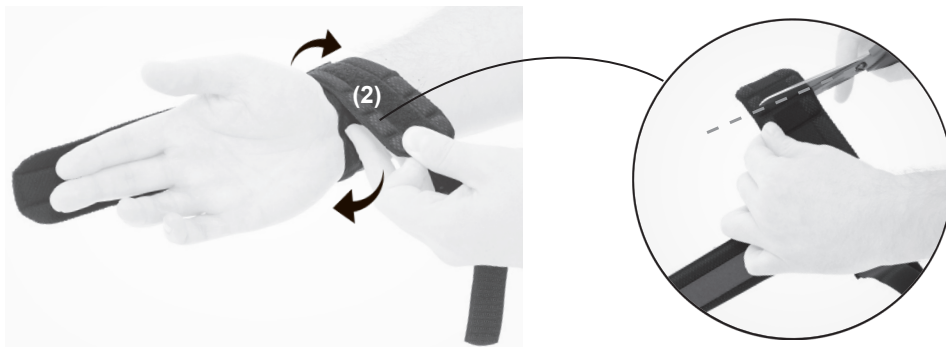


- 2. PL:** Opleć pasek wokół nadgarstka (2). Jeśli jest potrzeba, odetnij jego zbędną długość.  
**EN:** Wrap the strap around your wrist (2). If necessary, cut the needless part of the strap off.

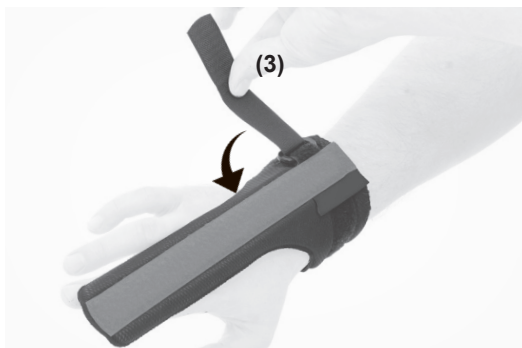



- 3. PL:** Przepleć taśmę przez klamerkę i zapnij na rzep (3).  
**EN:** Interlace the strap (3) through the buckle and fasten with Velcro (3).

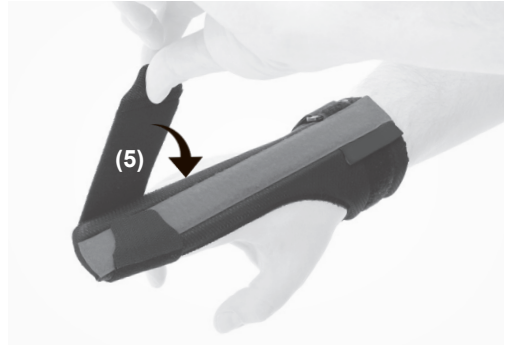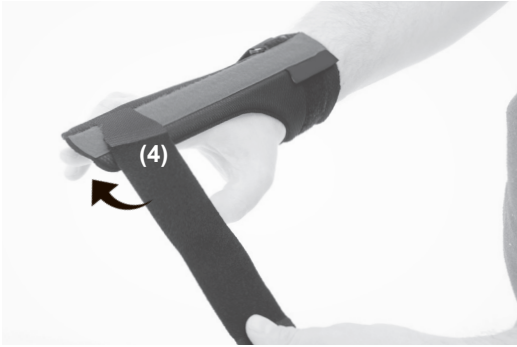

- 4. PL:** Przypnij taśmę (4) do ortozy, opleć palec we wskazanym kierunku i zapnij rzep (5).  
**EN:** Attach the strap (4) to the brace, wrap the finger in the indicated direction and fasten the Velcro (5).

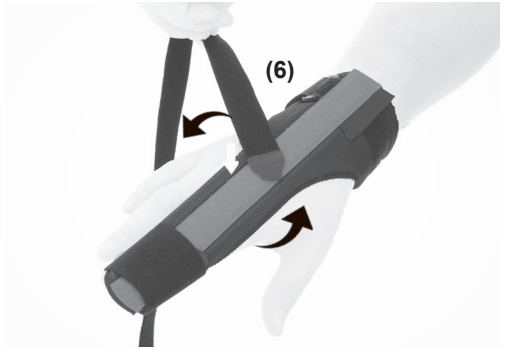

- 5. PL:** Przypnij taśmę (6) w okolicy śródreżca.  
**EN:** Attach the strap (6) in the metacarpal area.

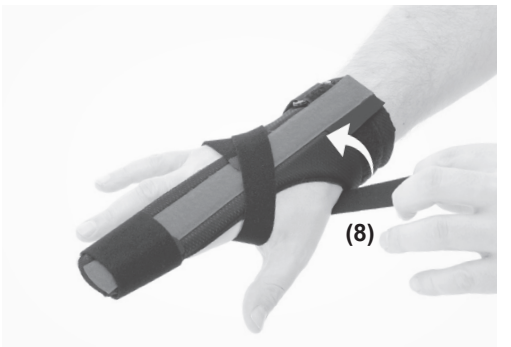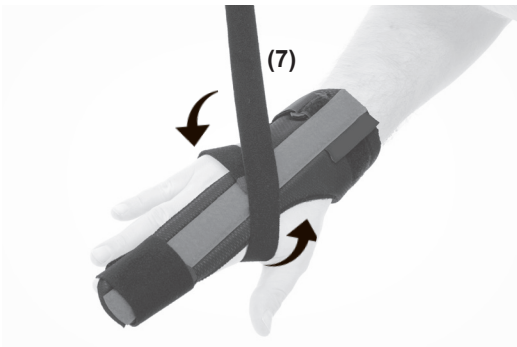

- 6. PL:** Owiń taśmę wokół śródreżca (7) i zapnij rzep (8).  
**EN:** Wrap the strap around the metacarpus (7) and close the Velcro (8).



- 4. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.

**PL:** UWAGA! W sposób opisany powyżej można usztywnić palce II-V.  
**EN:** WARNING! You can use the brace in this way to stiffen fingers II-V.