

KOD KATALOGOWY	AM-OSS-11
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOSTKI
MODEL	ORTEZA KOSTKI AM-OSS-11
CODE	AM-OSS-11
TRADE NAME	ANKLE ORTHOSIS
MODEL	ANKLE ORTHOSIS AM-OSS-11



1. **PL:** Załóż ortezę na nogę i zawiąż sznurówki.
EN: Put the brace on the leg and tie the laces.




2. **PL:** Umieść stopę na usztywnieniu i ustaw długość taśm bocznych.
EN: Place the foot on the insole and fit the side straps length.



3. **PL:** Zapnij boczne paski.
EN: Fasten the side straps.



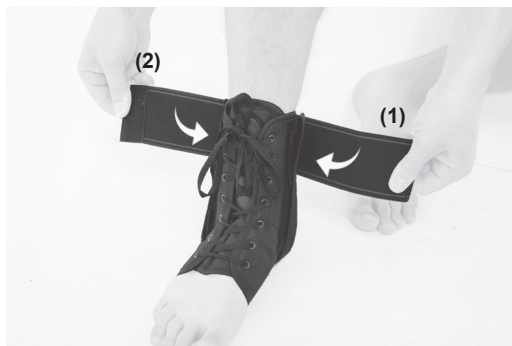

4. **PL:** Zapnij taśmy górne (1,2).
EN: Fasten the upper straps (1,2).



5. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.